



Stoma
Skin
Soul

Product
Catalogue
2026
ダンサック製品カタログ



株式会社ホリスター ダンサック
〒140-0002東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲21階
FAX: 050-3730-2628 E-MAIL: info@dansac.jp URL: www.dansac.jp

お問い合わせ先
0120-977138

使用する前に、使用目的、禁忌、警告、注意事項、および使用方法について使用説明書を必ずお読みください。
Dansacのロゴ、NovaLife、TRE は、Dansac A/S の商標です。©2025 Dansac A/S

15000207-202511S



dansac



dansac



Stoma
Skin
Soul

Feeling comfortable in your own skin

患者様の快適な生活をサポートいたします

ストーマとの生活は困難を伴います。
ダンサックでは、ストーマと共に生活する
人々やその介護をする人々の生活を
より良いものにするため、
お客様とともにストーマケア製品や
サービスの開発に取り組んでいます。



Contents

05	ダンサック製品情報概要
06	ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤 TRE™ テクノロジー
10	TRE™ 皮膚保護剤の使用をおすすめできる3つの理由
12	ノバライフ TRE™ シリーズ 消化管用排出口 製品特長
14	ノバライフ TRE™ イレオストミー 消化管用排出口 製品特長
16	ノバライフ TRE™ シリーズ 尿路用排出口 製品特長
18	ノバライフ TRE™ シリーズ 排出口 操作手順
19	ノバライフ TRE™ イレオストミー排泄口 アクセサリー取り付け 操作手順
20	ノバライフ TRE™ ウロストミー排泄口 アクセサリー取り付け 操作手順
21	アクセサリー取付手順 ドレインチューブアダプター／ダンサックベルト
22	凸面型面板の特性と臨床応用
24	ノバライフ TRE™ シリーズ 装具選択
26	ノバライフ TRE™ シリーズ 選択フローチャート
28	ノバライフ TRE™ シリーズ 皮膚保護剤の使い方のポイント／評価ポイント
30	アイコンリスト

33	単品系装具 ワンピース
34	ノバライフ1 TRE™ ミニ／ノバライフ1 TRE™／マキシ
35	ノバライフ1 TRE™ フィット／フィット マキシ
36	ノバライフ1 TRE™ コンベックス ミニ／コンベックス／コンベックス マキシ
37	ノバライフ1 ミニ／ノバライフ1／ノバライフ1 マキシ
38	ノバライフ1 フィット／フィット マキシ
39	ノバライフ1 コンベックス ミニ／コンベックス／コンベックス マキシ
40	ノバライフ1 ミニクローズ／クローズ
41	ノバ1 ミニフォールドアップ／フォールドアップ／マキシ フォールドアップ
42	ノバ1 フォールドアップ X3
43	ノバ1 フォールドアップ X5
44	ノバ1 フォールドアップ コンベックス
45	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー
46	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー フィット
47	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー コンベックス
48	ノバ1 イレオストミー
49	ノバ1 イレオストミー X5
50	ノバ1 イレオストミー コンベックス
51	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー
52	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー フィット
53	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー コンベックス
54	ノバ1 ウロストミー X3
55	ノバ1 ウロストミー コンベックス
56	ノバ1 インファント ドレイン（小児用）
57	ノバ1 ミニキャップ

59	二品系装具 ツーピース
60	ノバライフ2 TRE™ リング
61	ノバライフ2 TRE™ フィット リング
62	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング
63	ノバライフ2 リング
64	ノバライフ2 コンベックス リング
65	ノバライフ2 ミニオープン／オープン／マキシ オープン
	ノバライフ2 ミニクローズ／クローズ
66	ノバライフ2 イレオストミー
67	ノバ2 リング
68	ノバ2 X3 リング
69	ノバ2 X5 リング
70	ノバ2 コンベックス リング
71	ノバ2 ミニフォールドアップ／フォールドアップ
72	ノバ2 イレオストミー
73	ノバライフ2 ウロストミー
74	ノバ2 ウロストミー

77	ダンサックのアクセサリ
78	TRE™ シール（用手成形皮膚保護剤）
79	GX トラシール（リング状皮膚保護剤）／ダンサック バリアエクステンダー
	ソフトベースト（練状皮膚保護剤）
80	ダンサック消臭液ノドールS／スキンティッシュ／クランプ／ソフトワイヤータイ
81	ドレインネージバッグ 消化管用／ドレインネージバッグ 尿路用／ドレインチューブアダプター
82	ダンサックベルト／ベルトバック（ワンピース用）

83	インデックス 製品一覧 [装具]
90	インデックス 製品一覧 [アクセサリ]
91	インデックス 製品番号順索引

100	ホリスターのアクセサリ
101	泡つるりん 236mlボトル／8mlパック（アダプト消臭潤滑剤）
102	アダプトストーマパウダー 28.3g（粉状皮膚保護剤）
	アダプト保護膜パック（皮膚被膜剤）
103	アダプト剥離剤スプレー（粘着剥離剤）
	アダプト剥離剤パック（粘着剥離剤）
	キャップのシリーズ専用 コネクター

ノバライフ TRE™

単品系装具・二品系装具・用手成形皮膚保護剤

ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤は
本来あるべきお肌の健康な状態を維持する
唯一のテクノロジー¹を使用しています



ダンサック 製品情報概要 Products Information

ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤

ダンサックストーマ装具の特長

ノバライフ TRE™ シリーズ 製品特長/操作手順/アクセサリ取付手順

凸面装具5つの特性

ノバライフ TRE™ シリーズ 装具選択/選択フローチャート

ノバライフ TRE™ シリーズ 皮膚保護剤の使い方・評価のポイント

アイコンリスト

ダンサックのストーマ装具には様々な特長があります。
ストーマ装具専門メーカーならではの
ユニークな発想とそれを実現する技術により、
ストーマとともに歩む人々の「生活の質(QOL)」向上に
貢献してまいります。

ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤

TRE™ テクノロジー



スーパーアブソーバー（ポリアクリル酸ナトリウム）を配合した唯一の第3世代皮膚保護剤¹で、従来のハイドロコロイド素材より、水分を素早く、かつ多く吸収できます
更にドライロックテクノロジーにより、吸収した水分を吸水コアに閉じ込め、面板貼付に適した皮膚の状態を保つことができます²

TRE™ 皮膚保護剤の吸水作用



面板が白色に変化するのは吸水性を発揮したことを示しています

ダンサックは「お肌の健康」を第一に考え製品の開発に取り組んでいます。



素早い吸水性

従来の製品より吸水の速度が速い³

吸水速度試験

～従来品との比較～

TRE™ 皮膚保護剤およびGX 皮膚保護剤に蒸留水 250μL を滴下し、時間の経過とともに液滴の高さの減少を測定、吸水性を比較した結果、60分後にGX 皮膚保護剤と比べてTRE™ 皮膚保護剤はより速く吸水し、その速度が実証されました
TRE™ 皮膚保護剤は従来品に比べて吸水性が優れていることが確認できました

吸水速度試験³


	TRE™ 皮膚保護剤	GX 皮膚保護剤
0分		
10分		
30分		
60分		



ドライロックテクノロジー

大量の液体*を素早く吸収し、吸水コアに閉じ込める²

*面積1平方センチメートル当たり0.6グラムの液体

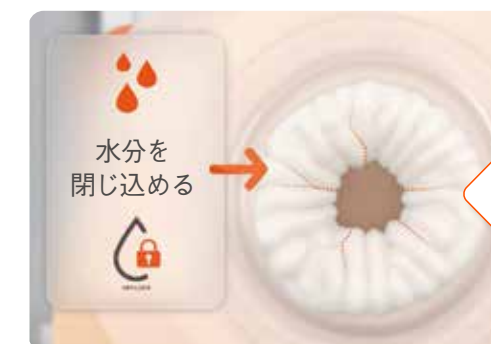

水分を吸収し膨潤、吸水コアに閉じ込める



1 TRE Technology US patent 9,422,463
2 Dansac data on file, PSD-06713, 11/24
3 Dansac data on file, LN-06901, 11/24. ref-04051, 2024, Laboratory In Vitro Study using water

ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤

TRE™ テクノロジー


「お肌の健康」に
積極的に働きかける皮膚保護剤



即効性のあるpH緩衝作用

TRE™ 皮膚保護剤のpH緩衝作用は、
自然で健康な肌のpHバランスを維持するようにデザイン¹

TRE™ テクノロジーによる即効性のあるpH緩衝作用

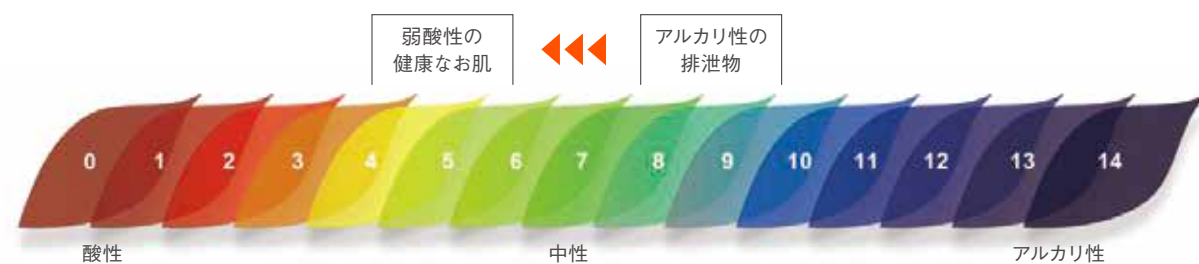

皮膚のpHを正常(弱酸性)に保つことは、
アルカリ性の排泄物によるダメージから
皮膚を守ることにつながります


皮膚障害リスク 高

pH緩衝試験¹

TRE™ 皮膚保護剤の
pH緩衝能力を確認

pH7.4のリン酸緩衝生理食塩水にさらされたときのpH変化に対する緩衝能力を測定

TRE™ 皮膚保護剤pH4～6内にとどまり、確実な緩衝作用を示しました

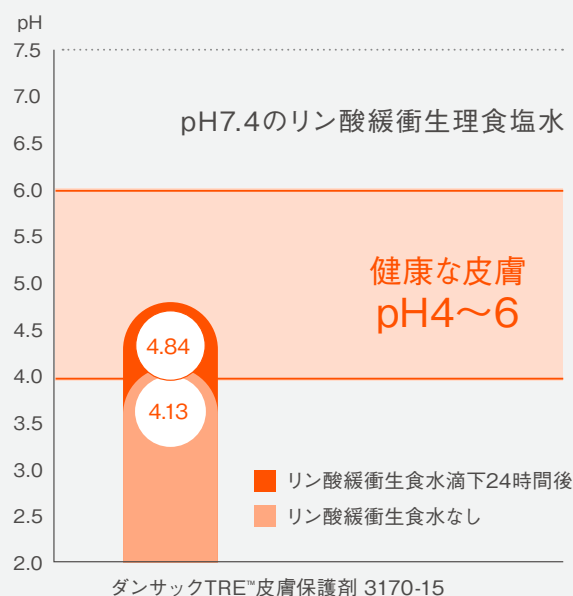

Values reflect average pH; three samples per barrier were tested for Surface pH as per BS ISO 12405-1:2014; five samples per barrier were tested for pH Buffer Challenge as per Hollister specifications TMD-00006 and TMD-00007

パーソナルフィット

さまざまなストーマ形状に対応し、膨潤することで、
しっかり密着・追従するようにデザイン²



TRE™ 皮膚保護剤は、膨潤することでしっかり密着・追従し、
漏れやストーマ周囲の皮膚合併症(PSC)の発生を低減させることが期待できます²



吸水した際の「波打ち」と「白色化」はTRE™皮膚保護剤の特徴的な変化を示しています²

持続する粘着力

水分を吸収した後も強度を失うことなく、
初期タックの強さを長期にわたり維持³

二層構造で巻き込みしにくい設計

プライマリー・レイヤー

保護が最も必要とされるストーマ近接部で
高い吸水性を発揮します

セカンダリー・レイヤー

標準的なハイドロコロイド技術を使用し、
プライマリーレイヤーの端で適切な湿潤環境を維持します



より薄いデザイン 従来品より36% 薄い

従来の1.1mmのハイドロコロイド製品に比べ、厚さはわずか0.7mm、辺縁部は0.3mm

¹ Dansac Technical report TR-00401
² TRE Technology US patent 9,422,463
³ ALL-01289, TMX-00095

ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤

TRE™ 皮膚保護剤の使用をおすすめできる3つの理由

ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤を使用した過去最大の研究

ダンサックは、ヨーロッパとアジア太平洋地域の11カ国で臨床研究を行いました。440人の看護師が、ダンサック TRE™ 皮膚保護剤を使用する前後の経過について評価しました。この研究は975人のストーマ保有者が参加した大規模臨床試験です。

皮膚の健康

ストーマ周囲皮膚の健康状態が有意に改善されました。

患者全体で平均DETスコアが1.8ポイント低下しました。(p<0.001)

※1 DET SCORE(ストーマ周囲の皮膚障害を評価するスコア)



快適性

ストーマ周囲皮膚の痛みに関連する不快感が有意に減少しました。

患者全体では、皮膚周囲の疼痛スケールが平均1.8ポイント減少しました。(p<0.001)


※2 PAIN SCORE(痛みのレベルを10段階に分け、痛みを図るスコア)



使いやすさ


装着時間が有意に延長でき、アクセサリや外用薬の必要性を減少させることができました。

シンプルケアを実現し、関連費用の軽減へとつながりました。

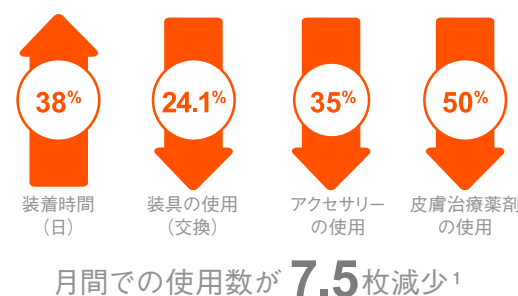

ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤は、臨床的なニーズを満たすだけでなく、ストーマ保有者のQOL(生活の質)の向上にも貢献します。

¹ Summa S, et al. A litmus test for innovation: a real-world evaluation of a pH-buffering ostomy barrier. World Council of Enterostomal Therapists Journal. 2021;41(3):16-21.

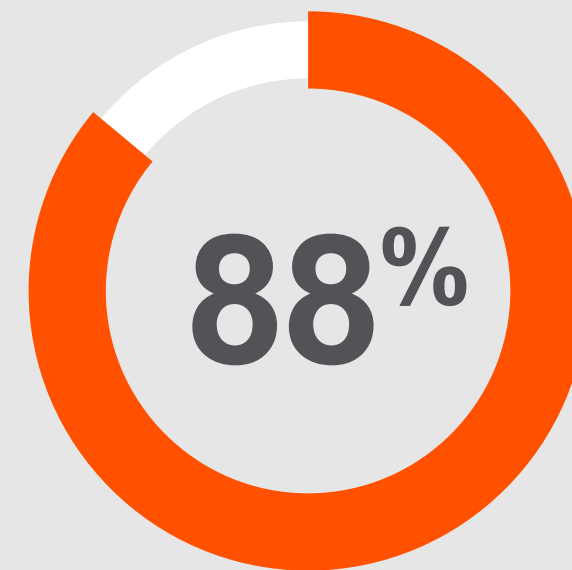

圧巻のパフォーマンス

88%の看護師がノバライフ TRE™ 皮膚保護剤の性能に対して「満足」しています¹

QOLの改善

患者さんの健康と幸福のために、皮膚の健康に焦点を当てた皮膚保護剤を選択する。

ノバライフ TRE™ シリーズ

消化管用排出口 製品特長

1 コンパクトになった上部のスペース

袋上部のスペースが小さいことで、端が折れにくく、体にフィットします。アクティブな動きを妨げません。

2 スマイリーカットタブ

リリースフィルムを剥がすためのタブがオレンジ色です。タブの位置がすぐにわかり、フィルムを剥がす時や装具交換の際も、簡単・安全に剥がすことができます。

3 楕円形の面板

楕円形の面板は、コンパクトサイズで体に自然にフィットし、お肌にしっかりと密着します。

4 体にフィットするテーパーエッジ形状

ストーマ周囲には厚みがあり、端に向かって徐々に薄くなっています。安心の密着力とやさらかさを実現しました。

5 豊富な種類のコンベックスインサート(凸型嵌め込み具)

フィット(やわらかい凸)6種類
コンベックス(かたい凸)4種類

深さ6mmのサイズの違う選べる凸面が腹壁の変化に追従、より適切にストーマ近接部を支持し、安定した貼付が可能です。

フィット (やわらかい凸)						
フリーカット	15-24mm	—	15-34mm	—	15-44mm	15-54mm
プレカット	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	—
インサート内径	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm	60mm

コンベックス (かたい凸)				
フリーカット	15-24mm	15-37mm	15-46mm	15-59mm
プレカット	25mm	30mm	35mm	40mm
インサート内径	30mm	40mm	50mm	65mm



面板も袋もコンパクトに、よりアクティブな暮らしを実現します。



6 安心、柔軟なカップリング(二品系装具)

面板と袋をしっかりとつなぐ安心、柔軟なカップリング。面板はフランジと皮膚保護剤の間に指が入るため、噛み合わせ時に腹部に圧をかけることなく簡単にストーマ袋の装着が可能です。



二品系装具

<フランジ径>



9 消臭ガス抜き性能に優れたノバライフフィルター

両面に撥水加工を施し、排泄物や外側からの水分の浸入を防ぐので、シールなどを使用せずに、そのまま入浴できます。また、通気性、消臭能力に優れておりストーマ袋の膨らみ、気になるにおいもしっかり抑えます。



8 排出口が自然と隠れるデザイン

一方向に4回巻き上げるだけで閉鎖でき、高い気密性が得られます。巻き上げた後は、体の動きを妨げません。 ※詳しくはP20



7 排出口が幅広で開閉が簡単、手早く排出でき衛生的

上下にずらしたクロージャープレートにより、排出口の開閉が衛生的に行えます。70mmの幅広排出口で、消臭潤滑剤等の注入が容易です。



排出後もさっと拭き取れて、シンプルで衛生的なセルフケアを実現します。

ノバライフ TRE™ イレオストミー 消化管用排出口 製品特長

1 モダンな外観

解剖学に基づいたストーマ袋の形状で、目立ちにくくより快適な使い心地を実現。

2 持ちやすいように設計されたソフトキャップ

開閉しやすい栓を差し込むタイプでしっかり密閉します。
やわらかく、柔軟で耐久性のある素材で、安全性を損なうことなく、繰り返しの使用に対応。
開栓したキャップをキャップホルダーで固定することができます。



3 16.5mmの大きな内径

詰まりの可能性を軽減し、さまざまな排泄物の状態でもスムーズに、早く排出しやすくなっています。



面板も袋もコンパクトに、
よりアクティブな暮らしを実現します。

4 安全な接続

消化管用ドレインネージバッグに直接接続できます。ひねるだけのロック式でしっかりと接続でき、安心感を与えます。



5 「ソフトタッチ」で柔軟なストーマ袋

よりソフトで柔軟な新素材の「ソフトタッチ」生地で、着用感と快適性が良くなるようデザインしています。



6 ストーマ袋サイズ

排出量が多くても対応できる大容量で、ストーマ袋から排出する回数を減らします。

7 収納式キャップ

収納式キャップは、使用しないときにキャップが邪魔にならないようにすっきりと収納でき、快適さを向上させます。(肌色のみ)



ノバライフ TRE™ シリーズ

尿路用排出口 製品特長

より安全・確実に 開閉できる排出口

1 確認しやすい 排出マークつき

大きなしずくのマークをエンボス加工で施しているため、目で見ても触って開閉の確認ができます。




2 やわらかい 触り心地

シリコン製で柔らかい触り心地です。



3 排泄時に尿の流量を 調節することが可能

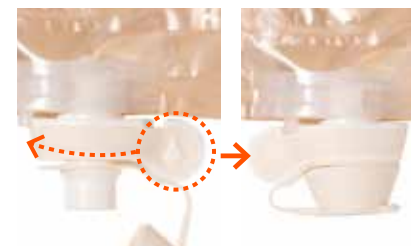

排出時、つまみを回して尿の流量を調節できます。

4 安心な キャップつき

大きくて開閉しやすいキャップ。



5 アダプター

蓄尿バッグへの接続が簡単にできます。



面板も袋もコンパクトに、
よりアクティブな暮らしを実現します。

9 スリム・プロファイル

ポスチャーシールとふくらみ防止構造によりストーマ袋の膨らみを軽減できます。




8 ふくらみ防止 消音構造



ふくらみ軽減バルブにより、尿を分散しストーマ袋下部の膨らみを抑えます。さらに、消音設計によりストーマ袋内の尿の揺れと音を軽減します。

6 膨らみを抑える ポスチャーシール

2つの分散ポイントによりストーマ袋上部の膨らみを抑え、スリムで目立ちにくい構造です。

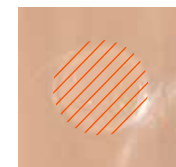

7 安心の 逆流防止弁

ストーマに尿が逆流することを防ぎます。



ノバライフ TRE™ シリーズ 排出口 操作手順

排出方法



1 閉鎖具を外し、ストーマ袋の中の排泄物を排出口に向かって押し出します。



2 排出口を無理に開けずに、ストーマ袋の上から排出口に向かって排泄物を静かに排出します。(排出口は自然に開きます)



3 この部分の排泄物をできるだけきれいに排出しますと、より閉鎖しやすくなります。




4 排出が終わったら、閉鎖具を押さえながらトイレトペーパーなどできれいに拭き取ります。

手を汚さず簡単に、衛生的に使えます

閉鎖方法



拭き取りが終わったら、しっかりと手前に4回巻き上げます。

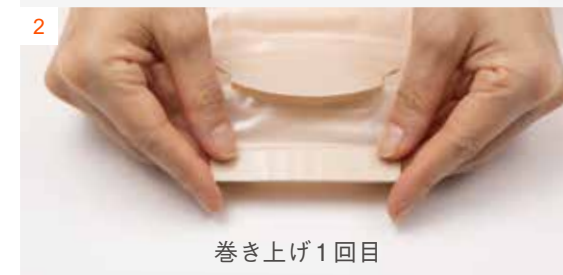

巻き上げ1回目



巻き上げ2回目



巻き上げ3回目



巻き上げ4回目



閉鎖具を閉めます。

ノバライフ TRE™ イレオストミー 排泄口 アクセサリー取り付け 操作手順

排出方法



1 排出口を上にもむける



キャップを外す時のコツ

ティッシュペーパーなどを添えてゆっくりキャップを押し出すようにして開けると便の飛び散りなく外せます。



2 キャップを外す



3 排出口を下にもむけて排出する



キャップホルダー

排出時にキャップホルダーにキャップをはめることもできます。

専用排液バッグとの接続方法



1 キャップをキャップホルダーにはめる
※キャップホルダーにはめなくてもコネクターの使用は可能です。



2 排出口先端の突起の位置を確認する



3 突起と突起の間の溝にロック部分がかみ合うようにコネクターを差し込む




4 時計回りにひねりロックする
(最後に軽く引っ張り、外れないか確認)

ノバライフ TRETM ウロストミー

排泄口 アクセサリー取り付け 操作手順

排出方法

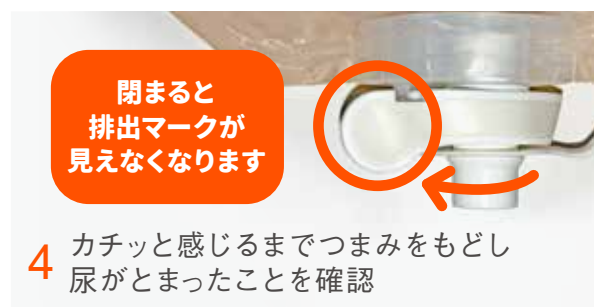

アダプターとの接続





アクセサリ取付手順

ドレインチューブアダプター(ウロストミー用) / ダンサックベルト(ワンピース用)

ドレインチューブアダプター取付方法



ダンサックベルト取付方法

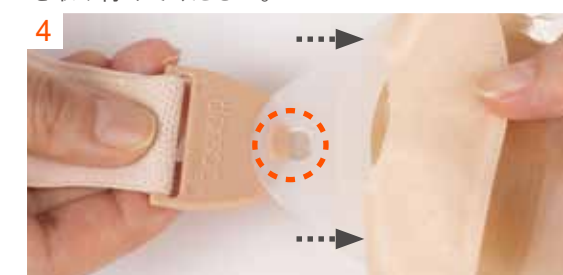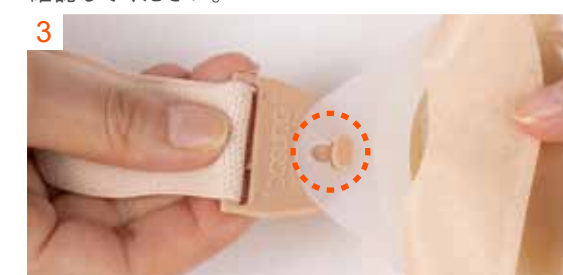

凸面型面板の特性と臨床応用

国際コンセンサス・パネルの結果

McNichol, L, Cobb, T, Depaifve, Y, Quigley, M, Smitka, K & Gray, M 2021, ' Characteristics of Convex Skin Barriers and Clinical Application- Results of an International Consensus Panel' - *Journal Wound Ostomy Continence Nursing*, 48(6): 524-532.

手法

ストーマケアの豊富な経験をもつ看護師12名によるコンセンサス


結果

凸面型面板に関する5つの特性および16の臨床応用に関する記述に至る

結論

患者により良い転帰をもたらす目的で、医療従事者が評価基準に基づいた適切な凸面型面板を選択するための標準定義を作成

重要なケアの優先順位は漏れを防ぐことができる信頼性の高い装具を選択することです。装具選択に必要な5つの特性をご参照ください。

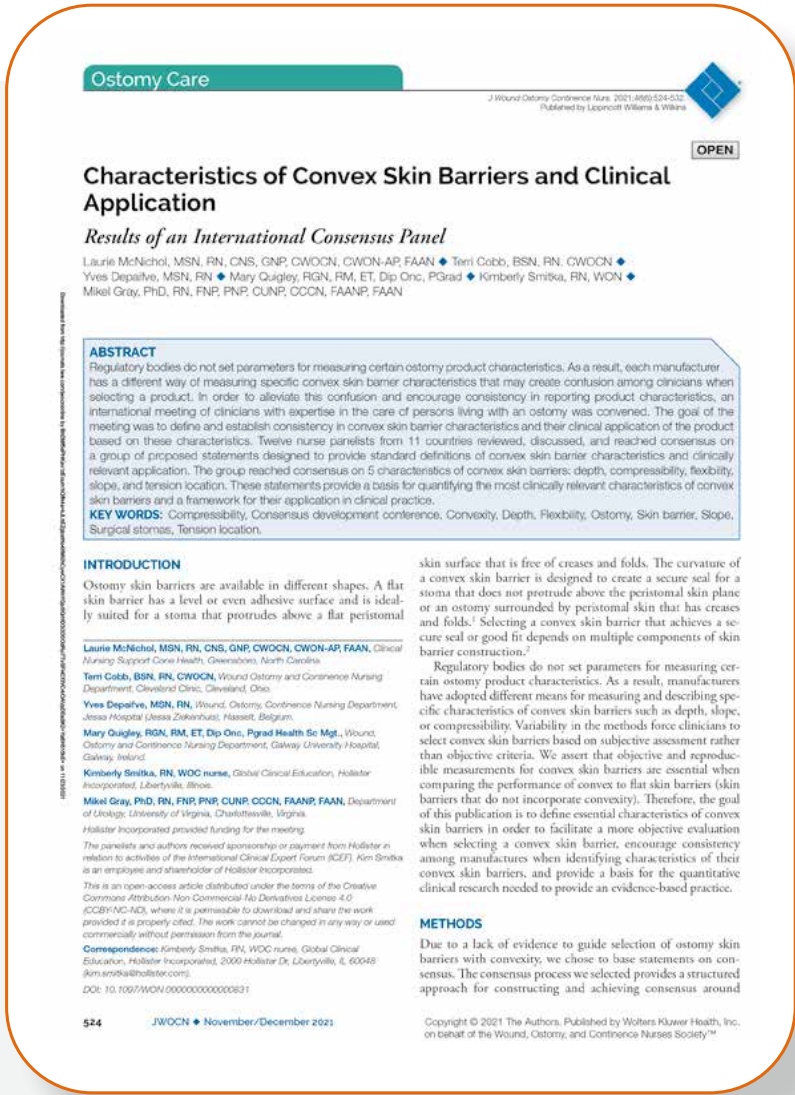


凸面型面板5つの特性の定義

深さ



凸面型面板の深さの定義は、凸面のドームの頂点から基部までの距離になります。

圧縮性 (変形量)

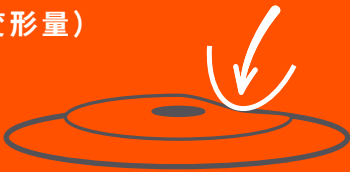

圧縮性は、凸面のドームがへこんだり、平坦になったりする容量(変形量)のことです。

柔軟性




柔軟性は、凸面型面板がどれだけ簡単に曲がるかを意味します。

張力の位置



張力の位置は、凸型ドームからストーマ近接部の腹壁形状に対して下方向および外方向の力がかかる位置のことです。


傾斜

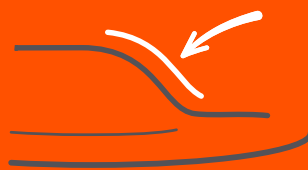

傾斜は、凸面型面板の底辺から凸型ドームの頂点までの角度です。

ノバライフ TRETM シリーズ 装具選択

ノバライフ TRETM 凸面型面板の特性


深さ		汎用性の高い6mm。ストーマの高さをだすことや、皺や窪みを補正することができます。
圧縮性 (変形量)		圧縮性が高く皺や窪みを平坦にすることができます。軟性凸面は硬い腹壁にもしっかり追従。硬性凸面は柔らかい腹壁をしっかり押さえ追従します。
柔軟性		柔軟性が高く、軟性凸面は突出した腹壁、オーバーハングした腹壁にもしっかり追従。硬性凸面は柔らかくたるみがある腹壁にもしっかり追従します。
張力の位置		豊富な凸面型面板のインサートがあり位置を調整しやすくストーマの高さを出したり皺を伸ばすことも容易にできます。
傾斜		なだらかな傾斜で、たるんだ腹壁を平坦にできます。

ノバライフ TRETM 皮膚保護剤を使用したストーマ装具の選択肢です。
患者のストーマに合わせて選択いただける、豊富なラインアップをご用意しております。

ノバライフ TRE TM (平面)	
平面	 <p>しなやかなつけ心地の平面</p> <p>ノバライフ1 TRETM... P34, 45, 51 ノバライフ2 TRETM... P60</p>
ノバライフ TRE TM (平面) + TRE TM シール	
平面	 <p>しなやかなつけ心地で コストパフォーマンスに優れた平面</p> <p>ノバライフ1 TRETM... P34, 45, 51 ノバライフ2 TRETM... P60 TRETMシール ... P78</p> <p>※シールは平面だけでなく、フィット、コンベックスにもご使用いただけます。</p>
ノバライフ TRE TM フィット(やわらかい凸6mm)	
SOFT	 <p>ストーマ近接部をしっかり押さえる 6種類のコンベックスインサートを 内蔵した6mm軟性凸面</p> <p>ノバライフ1 TRETM... P35, 46, 52 ノバライフ2 TRETM ... P61</p>
ノバライフ TRE TM コンベックス(かたい凸6mm)	
HARD	 <p>よりしっかりストーマ近接部を 押さえる6mm硬性凸面</p> <p>ノバライフ1 TRETM... P36, 47, 53 ノバライフ2 TRETM ... P62</p>

ノバライフ TRE™ シリーズ 選択フローチャート

ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤を使用したストーマ装具の選択フローチャートです。
患者様のストーマに合わせて選択いただける、豊富なラインナップをご用意しております。
装具選択のご参考にご活用ください。

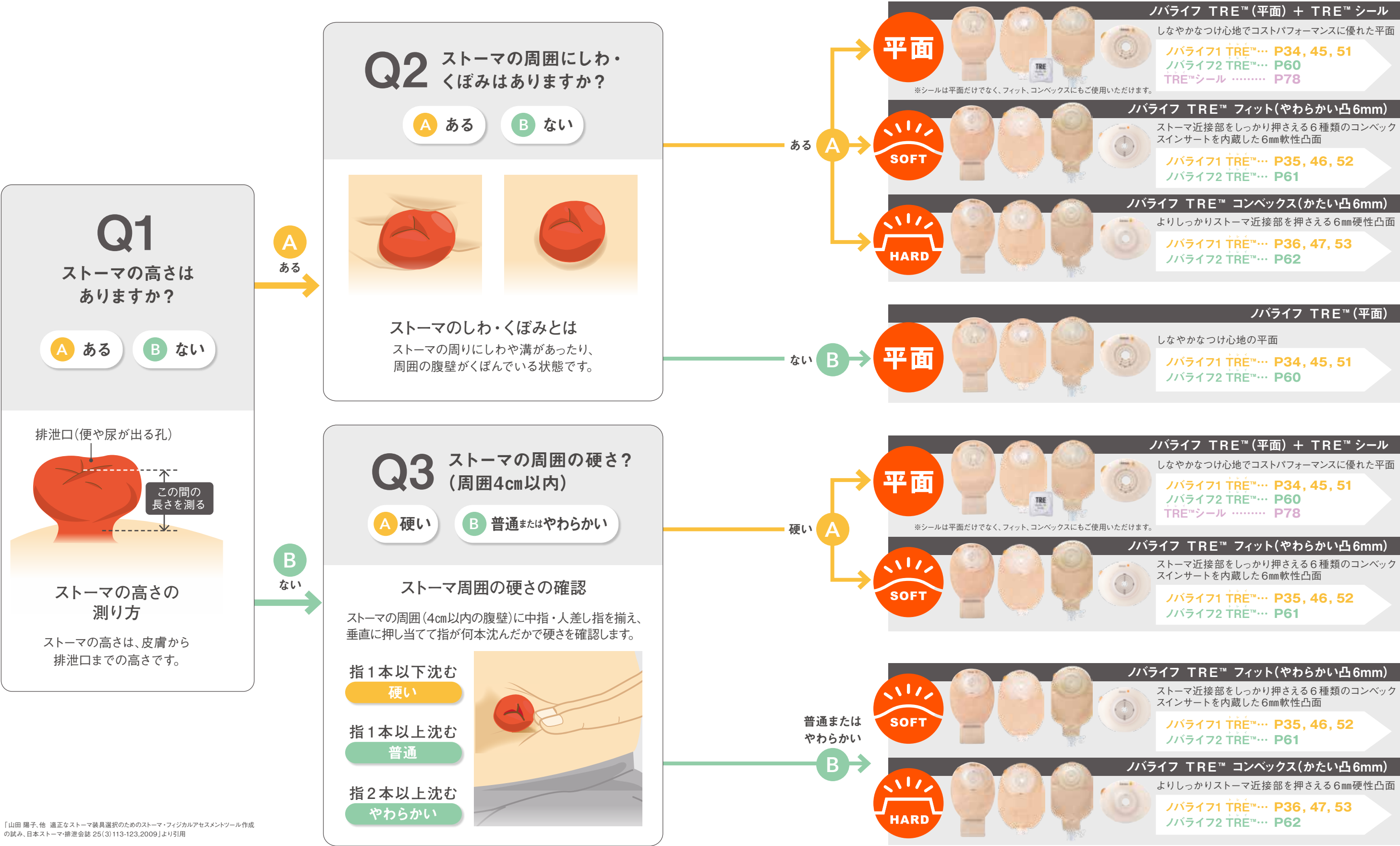

「山田 陽子、他 適正なストーマ装具選択のためのストーマ・フィジカルアセスメントツール作成の試み、日本ストーマ・排泄会誌 25(3) 113-123, 2009」より引用


ノバライフ TRE™ シリーズ 皮膚保護剤の 使い方のポイント

従来のハイドロコロイド皮膚保護剤とは異なり、
スーパーアブソーバー（ポリアクリル酸ナトリウム）を配合した
唯一の第3世代皮膚保護剤¹であるため…

ポイント



1. 評価時には、まず**皮膚の状態をご確認**ください
2. たとえ皮膚に便が付着していても、皮膚の状態に問題がなければ継続使用できます

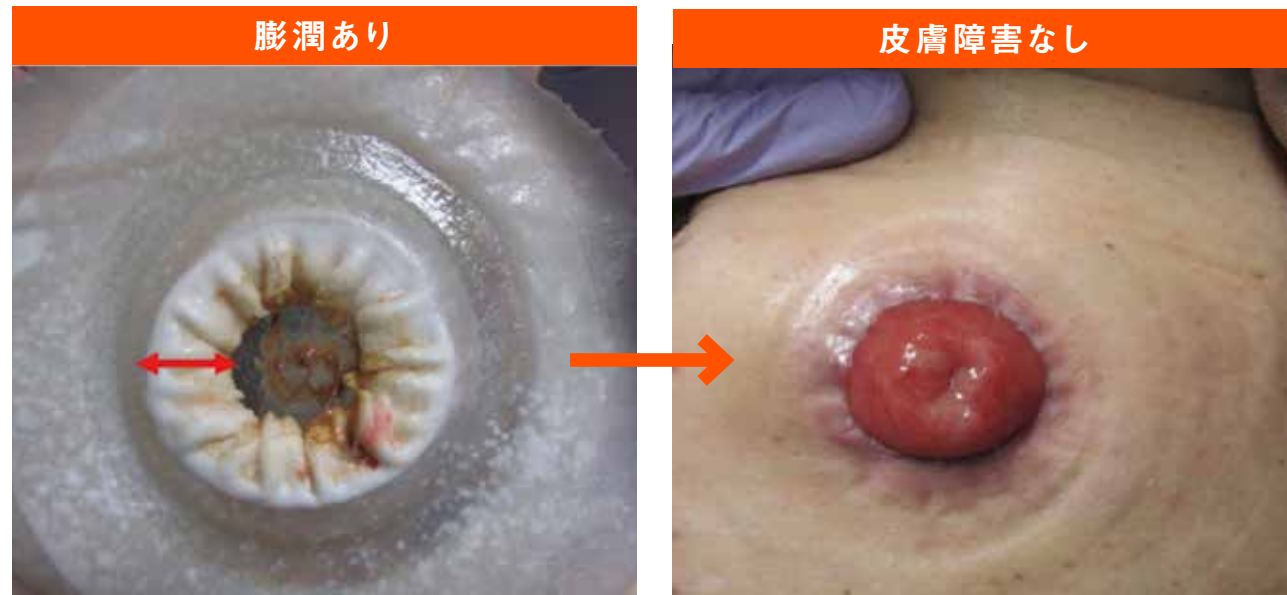

波打つような膨潤の跡が皮膚にもついています、時間の経過と共に消失します。

TRE™ 皮膚保護剤は、**面板の膨潤の幅が装具交換の目安にはなりません**
まずは貼付からそれぞれの装着期間目安を参考に、皮膚の状態を確認の上、
交換間隔をご判断ください

¹ TRE Technology US patent 9,422,463

ノバライフ TRE™ シリーズ 皮膚保護剤の 評価ポイント

皮膚浸軟が起きていないかを確認する



装具を剥がした後に、
皮膚に浸軟が生じていないかを確認



皮膚に浸軟がある場合、
皮膚障害が発生するリスクが高い



便の性状を確認する



BSS 5以下の場合

装具は5日目交換で皮膚障害は発生していないことから、5日交換でも安全に使用することが可能



BSS 6以上の場合

4日以内の交換を推奨し、
5日目以降を検討する場合は
用手成形皮膚保護剤の併用も検討する

ブリストル便性状スケール (BSS)

BSS 1	コロコロ便	
BSS 2	硬い便	
BSS 3	やや硬い便	
BSS 4	普通便	
BSS 5	やや軟らかい便	
BSS 6	泥状便	
BSS 7	水様便	

ノバライフTRE™ ワーキング・グループ
2021年JSSCR 発表

男性：30名/女性：29名
平均年齢：72.1歳

研究期間：1年/症例数：59例

●コロストミー：50例、イレオストミー：9例

●平面：2例、フィット：53例、コンベックス：4例

アイコンリスト

面板／ストーマ袋／フィルター

面 板



ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤

赤ちゃんのおむつや化粧品などに一般的に使用されている成分を配合し、お肌を健全な環境に整える、全く新しい膨潤型の皮膚保護剤です。面板の各部におけるニーズに対応するために皮膚保護剤を二層構造にし、ストーマ周囲皮膚はしっかりと保護すると共に、面板辺縁部は身体の動きに追従します。

面板 ●



GX親水性皮膚保護剤

天然素材を原材料とするお肌にやさしい皮膚保護剤です。PIB・ペクチン・ゼラチン・CMC・コットンファイバーが配合され、弱酸性の人のお肌に非常に近いpH値5.2になるように設計された溶解型の皮膚保護剤です。

面板 ● ●

平面

平面

やわらかい面板がストーマ周囲の腹壁にしなやかになじみます。

面板 ● ● ●



やわらかい凸6mm

深さ6mmのやわらかい凸面が腹壁の変化に追従します。6種類のサイズの違うやわらかい凸面が、より適切にストーマ近接部を支持します。


面板 ● ● ●



かたい凸6mm

それぞれの孔に適した、サイズの違う深さ6mmのコンベックスインサートを内蔵しているため、ストーマ近接部にしっかり圧をかけられます。(ノバシリーズは3種類・ノバライフシリーズは4種類のサイズがあります)

面板 ● ● ● ●

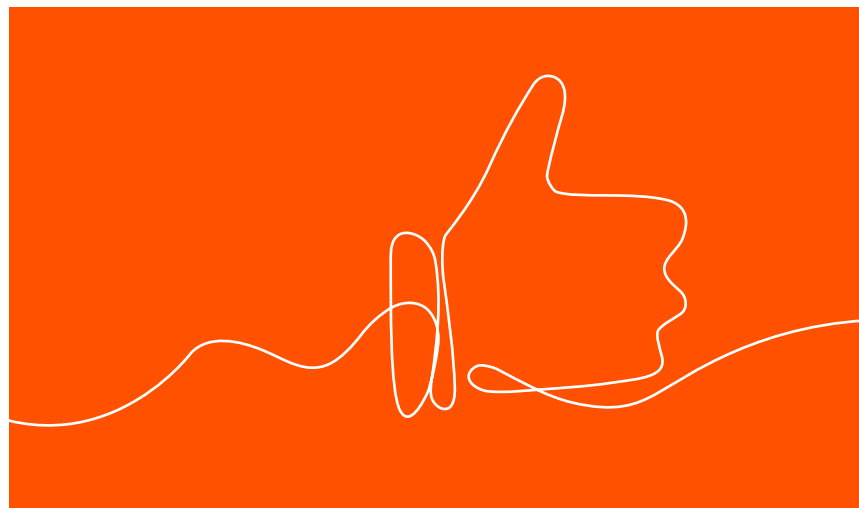

● ノバライフ TRE™ シリーズ / ● ノバライフ シリーズ / ● ノバ シリーズ

面 板



テーパード エッジ形状

面板のストーマ周囲を厚く、辺縁部を薄くし、腹部のしわやくぼみに密着できるテーパードエッジ形状。辺縁部を薄くすることで、高い柔軟性を実現しました。また辺縁部が非常に薄いため、全面皮膚保護剤の面板の違和感が軽減されます。

面板 ● ● ●



ロープロ ファイルロック

面板側は肌色、ストーマ袋側は半透明にフランジが色分けされており、噛み合わせを目で確認できると共に、噛み合わせ時の「カチッ」という音でも確認できる確実なロープロファイルロックです。寝返りやスポーツなどでも外れる心配がなく、付け外しも簡単です。

面板 ● ● ●



楕円形 面板

小さめのサイズで体に自然にフィットし、肌にしっかりと密着します。しかも、漏れの起こりやすいストーマ近接部を広くカバーし、漏れを防止します。

面板 ● ●



しなやか構造

ダンサックの皮膚保護剤のしなやかさは快適性と柔軟性を提供します。



面板 ● ● ●



ひし形 面板

ひし形の形状が、漏れの起こりやすいストーマの横側と下側を広くカバーし、しわやくぼみにフィットして漏れを防止します。

面板 ●



透明 リリース フィルム

ダンサックの面板の透明リリースフィルムは、皮膚保護剤の状態が観察でき、タブ付きで簡単に取り外し可能。フリーカット製品は鉛筆等で自由に書き込めるため、型紙としてもご利用いただけます。

面板 ● ● ●



セミフィックス フランジ

フランジと皮膚保護剤の間に指が入る浮動型のセミフィックスフランジを採用。噛み合わせ時に腹部を圧迫することなく簡単にストーマ袋を装着できるので、術直後からの使用が可能です。

面板 ● ● ●

ストーマ袋



肌色不織布

ダンサックは、1986年に世界で初めてストーマ器具の接皮面側にやわらかな不織布を採用。水に濡れてもサラッとしていて、肌色で目立ちにくい撥水性の不織布を使用しています。汗や入浴で濡れた後でも簡単に水分を拭き取ることができ、下着を濡らすことなく、肌触りの良さを保ちます。

ストーマ袋 ● ● ●



5層 エンボス フィルム

においの元を遮断するポリ塩化ビニリデン(PVDC)とエチルビニルアセテート(EVA)による5層フィルム。においや漏れを防ぎ、不快感を低減しますので安心です。



ストーマ袋 ● ● ●



ベルト タブ付

ストーマ袋の装着をさらに安定させたい時に、ベルトを付けることができます。ツーピース装具はすべてのストーマ袋にベルトタブがあります。




ストーマ袋 ● ● ●



逆流防止機構

ウロストミー（泌尿器系）ストーマ袋には、蓄積された尿がストーマに逆流しない逆流防止機構を採用。細菌感染の危険性を最小限に抑えます。

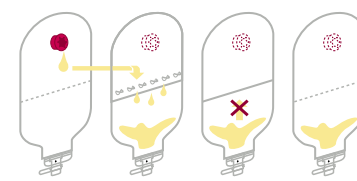

ストーマ袋 ● ● ●



ダブル ロッキング システム

ストーマ袋は二重に溶着されているため、高い安全性が保たれます。

ストーマ袋 ●



あんしん窓

普段はストーマ袋の内部を隠していますが、必要な時「だけ」見ることが可能です。

ストーマ袋 ● ●


フィルター



ノバライフ フィルター

両面撥水加工
シール不要

通気性・消臭能力に優れたノバライフフィルターが、ガスによるストーマ袋の膨らみ、気になるにおいをしっかり抑えます。さらに排泄物や外側からの水分の浸入を防ぐために撥水加工を施しています。シールなしで入浴できます。

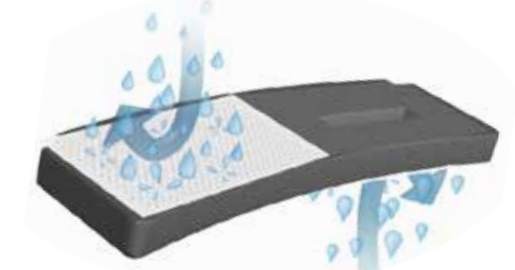

フィルター ● ●



テフロン膜

フィルターに貼付された撥水性の高いテフロン膜が、水分の浸入や排出物の漏れを防ぎます。入浴時にシールを貼る手間も不要です。

フィルター ●



入浴可 シール不要


装具全体が撥水性、気密性、耐久性に優れていますので安心してご入浴いただけます。

フィルター ● ● ●



単品系装具 ワンピース One Piece

ノバライフ1 ^{トレイ} TRE™ シリーズ
ノバライフ1 シリーズ
ノバ1 シリーズ

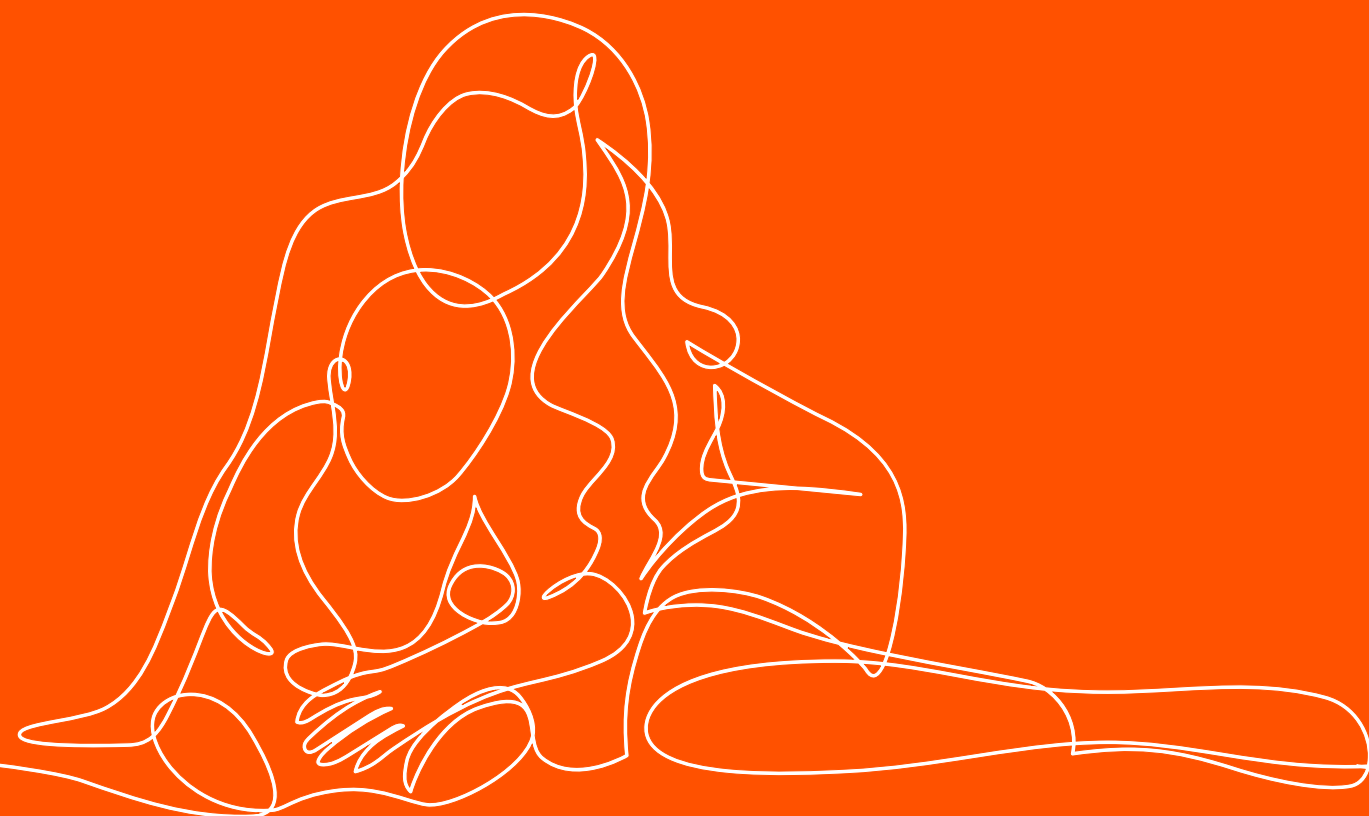

単品系 装具ワンピース

ノバライフ1 TRETM フィット
ノバライフ1 TRETM フィット マキシ



やわらかい凸6mm



閉鎖具内蔵



皮膚保護剤



装着期間目安



ノバライフ1 TRETM ミニ

ノバライフ1 TRETM

ノバライフ1 TRETM マキシ




ノバライフ1 TRETM フィット

ノバライフ1 TRETM フィット マキシ

品 名		ノバライフ1 TRE™ ミニ		ノバライフ1 TRE™		ノバライフ1 TRE™ マキシ			
粘着面 (mm)		72 × 85		89 × 105		89 × 105		106 × 125	
ストーマ袋サイズ (mm)		220 × 132		239 × 144		259 × 158			
凸型嵌め込み具の深さ		—		—		—		—	
装着期間目安		～5日※1		～5日※1		～5日※1			
包装 入数		10 枚入		10 枚入		10 枚入			
価格 (非課税)		5,800円		6,000円		6,000円		7,000円	
カット	ストーマ サイズ	製 品 番 号							
		透 明	肌 色	透 明	肌色 (あんしん窓)	透 明	肌色 (あんしん窓)	透 明	肌色 (あんしん窓)
フリーカット (自由開孔) タテ×ヨコ	15-38×50mm	3026-15/10	3025-15/10						
	15-55×70mm			3024-15/10	3023-15/10	3018-15	3017-15		
	15-70×90mm							3016-15	3015-15
プレカット (既製孔)	25mm			3024-25/10	3023-25/10	3018-25	3017-25		
	30mm			3024-30/10	3023-30/10	3018-30	3017-30		
	35mm			3024-35/10	3023-35/10				
	40mm			3024-40/10	3023-40/10				
	45mm			3024-45/10					

コロストミー／イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

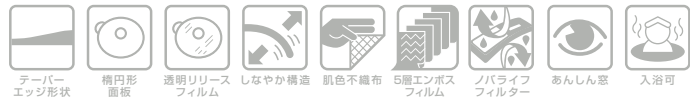

品 名		ノバライフ1 TRE TM フィット		ノバライフ1 TRE TM フィット マキシ	
粘着面 (mm)		110 × 130		110 × 130	
ストーマ袋サイズ (mm)		239 × 144		259 × 158	
凸型嵌め込み具の深さ		6mm		6mm	
装着期間目安		～6日 ^{※1}		～6日 ^{※1}	
包装 入数		10 枚入		10 枚入	
価 格 (非課税)		9,500円		9,500円	
カット	ストーマサイズ	製 品 番 号			
		透 明	肌 色 (あんしん窓)	透 明	肌 色 (あんしん窓)
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	3082-24 ^{※2}	3081-24 ^{※2}		
	15-34mm	3082-34	3081-34	3084-34	3083-34
	15-44mm			3082-44	3081-44
	15-54mm			3082-54 ^{※3}	3081-54 ^{※3}
プレカット (既製孔)	25mm	3082-25 ^{※2}	3081-25 ^{※2}	3084-25	3083-25
	30mm	3082-30	3081-30	3084-30	3083-30
	35mm	3082-35	3081-35	3084-35	3083-35
	40mm			3082-40	3081-40
	45mm			3082-45	3081-45

コロストミー／イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。
※2 粘着面107×91mm
※3 粘着面150×127mm



さらなる安心感 別売品 詳しくはP82

ダンサックベルト
価格 770円(税込)
サイズ:100cm
白 : 製品番号:09000-0000
肌色 : 製品番号:090-02



単品系 装具ワンピース

ノバライフ1 ミニ
ノバライフ1
ノバライフ1 マキシ



平面 閉鎖具内蔵 皮膚保護剤 装着期間目安

単品系 装具ワンピース

ノバライフ1 TRETM コンベックス ミニ
ノバライフ1 TRETM コンベックス
ノバライフ1 TRETM コンベックス マキシ



かたい凸6mm 閉鎖具内蔵 皮膚保護剤 装着期間目安




ノバライフ1 TRETM コンベックス ミニ ノバライフ1 TRETM コンベックス ノバライフ1 TRETM コンベックス マキシ



ノバライフ1 ミニ ノバライフ1 ノバライフ1 マキシ

品 名		ノバライフ1 TRE ™ コンベックス ミニ		ノバライフ1 TRE ™ コンベックス		ノバライフ1 TRE ™ コンベックス マキシ	
粘着面 (mm)		91 × 107		98 × 116		127 × 150	
ストーマ袋サイズ (mm)		220 × 132		239 × 144		259 × 158	
凸型嵌め込み具の深さ		6mm		6mm		6mm	
装着期間目安		～6日※ ¹		～6日※ ¹		～6日※ ¹	
包装 入数		10 枚入		10 枚入		10 枚入	
価 格 (非課税)		9,900円		9,900円		9,900円	
カット	ストーマサイズ	製 品 番 号					
		透 明	肌 色	透 明	肌色(あんしん窓)	透 明	肌色(あんしん窓)
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	3042-24		3046-24※ ²	3045-24※ ²		
	15-37mm			3042-37	3041-37		
	15-46mm			3042-46※ ³	3041-46※ ³		
	15-59mm					3042-59	3041-59
ブレカット (既製孔) ☆最大有効径	25mm			3046-25※ ²	3045-25※ ²		
	30mm(☆～37mm)			3042-30	3041-30		
	35mm			3042-35	3041-35		
	40mm(☆～46mm)			3042-40※ ³	3041-40※ ³		

コロストミー／イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。
※2 粘着面 107×91mm
※3 粘着面 130×110mm

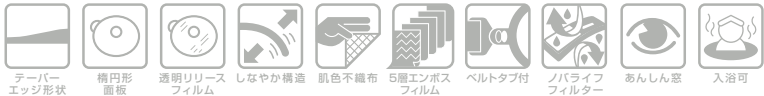

さらなる安心感 別売品 詳しくはP82

ダンサックベルト

価格 770円(税込)

サイズ: 100cm

白 : 製品番号: 09000-0000

肌色 : 製品番号: 090-02



品 名		ノバライフ1 ミニ		ノバライフ1		ノバライフ1 マキシ	
粘着面 (mm)		72 × 85		89 × 105		106 × 125	
ストーマ袋サイズ (mm)		220 × 132		239 × 144		259 × 158	
凸型嵌め込み具の深さ		—		—		—	
装着期間目安		1-3 日※ ¹		1-3 日※ ¹		1-3 日※ ¹	
包装 入数		10 枚入		10 枚入		10 枚入	
価 格 (非 課 税)		5,600 円		6,100 円		7,100 円	
カット	ストーマサイズ	製 品 番 号					
		透 明	肌 色	透 明	肌 色	透 明	肌 色
フリーカット (自由開孔) タテ×ヨコ	10-38×50mm	926-10/10	925-10/10				
	10-55×70mm			924-10/10	923-10/10		
	10-70×90mm					916-10/10	915-10/10
ブレカット (既製孔)	25mm			924-25/10	923-25/10	916-25/10	
	30mm			924-30/10	923-30/10	916-30/10	915-30/10
	35mm			924-35/10	923-35/10	916-35/10	915-35/10
	40mm			924-40/10	923-40/10		
	45mm			924-45/10			

コロストミー／イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



単品系 装具ワンピース

ノバライフ1 コンベックス ミニ
ノバライフ1 コンベックス
ノバライフ1 コンベックス マキシ



かたい凸6mm



閉鎖具内蔵



皮膚保護剤



装着期間目安

単品系 装具ワンピース

ノバライフ1 フィット
ノバライフ1 フィット マキシ



やわらかい凸6mm



閉鎖具内蔵



皮膚保護剤



装着期間目安



ノバライフ1 フィット



ノバライフ1 フィット マキシ



ノバライフ1 コンベックス ミニ



ノバライフ1 コンベックス



ノバライフ1 コンベックス マキシ

品 名		ノバライフ1 フィット		ノバライフ1 フィット マキシ	
粘着面 (mm)		110 × 130		110 × 130	
ストーマ袋サイズ (mm)		239 × 144		259 × 158	
凸型嵌め込み具の深さ		6mm		6mm	
装着期間目安		1-4 日※ ¹		1-4 日※ ¹	
包装 入数		10 枚入		10 枚入	
価格 (非課税)		8,700円		8,700円	
カット	ストーマサイズ	製品番号			
		透 明	肌 色 (あんしん窓)	透 明	肌 色 (あんしん窓)
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	982-24※ ²	981-24※ ²	984-24	983-24
	15-34mm	982-34	981-34	984-34	983-34
	15-44mm			982-44	981-44
	15-54mm			982-54※ ³	981-54※ ³
ブレカット (既製孔)	25mm	982-25※ ²	981-25※ ²	984-25	983-25
	30mm	982-30	981-30	984-30	983-30
	35mm	982-35	981-35	984-35	983-35
	40mm			982-40	981-40
	45mm			982-45	981-45

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

※2 粘着面107×91mm

※3 粘着面150×127mm



テーパー
エッジ形状



楕円形
画板



透明リリース
フィルム



しなやか構造



肌色不織布



5層エンボス
フィルム



ベルトタブ付



ノバライフ
フィルター



あんしん窓



入浴可

さらなる安心感 別売品 詳しくはP82

ダンサックベルト

価格 770円(税込)

サイズ:100cm

白 :製品番号:09000-0000

肌色 :製品番号:090-02



品 名		ノバライフ1 コンベックス ミニ		ノバライフ1 コンベックス				ノバライフ1 コンベックス マキシ	
粘着面(mm)		91 × 107		98 × 116		110 × 130		127 × 150	
ストーマ袋サイズ(mm)		220 × 132		239 × 144				259 × 158	
凸型嵌め込み具の深さ		6mm		6mm				6mm	
装着期間目安		1-4日※1		1-4日※1				1-4日※1	
包装 入数		10 枚入		10 枚入				10 枚入	
価 格 (非課税)		9,300円		9,300円				9,300円	
カット	ストーマサイズ	製 品 番 号							
		透 明	肌 色	透 明	肌 色	透 明	肌 色	透 明	肌 色
フリーカット (自由開孔)	10-24mm	942-24							
	10-37mm			942-37	941-37				
	10-46mm					942-46	941-46		
	10-59mm							942-59	941-59
ブレカット (既製孔) ☆最大有効径	20mm(☆~24mm)	942-20							
	25mm	942-25	941-25						
	30mm(☆~37mm)			942-30	941-30				
	35mm			942-35	941-35				
	40mm(☆~46mm)					942-40	941-40		
	45mm					942-45	941-45		
	50mm(☆~59mm)							942-50	941-50

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



テーパー
エッジ形状



楕円形
画板



透明リリース
フィルム



しなやか構造



肌色不織布



5層エンボス
フィルム



ベルトタブ付



ノバライフ
フィルター



入浴可

さらなる安心感 別売品 詳しくはP82

ダンサックベルト

価格 770円(税込)

サイズ:100cm

白 :製品番号:09000-0000

肌色 :製品番号:090-02



単品系装具ワンピース

ノバ1 ミニフォールドアップ
ノバ1 フォールドアップ
ノバ1 マキシ フォールドアップ



ノバライフ1 ミニクローズ

ノバライフ1 クローズ



ノバ1 ミニフォールドアップ

ノバ1 フォールドアップ

ノバ1 マキシ フォールドアップ

品 名		ノバライフ1 ミニクローズ	ノバライフ1 クローズ		
粘着面(mm)		72 × 85	89 × 105		
ストーマ袋サイズ(mm)		175 × 130	190 × 145		
凸型嵌め込み具の深さ		—	—		
装着期間目安		1-3日※1	1-3日※1		
包装入数		10枚入	10枚入		
価格(非課税)		4,000円	4,000円		

カット	ストーマサイズ	製品番号		
		肌色	透明	肌色
フリーカット (自由開孔) タテ×ヨコ	10-38 × 50mm	903-10/10		
	10-55 × 70mm		902-10/10	901-10/10
ブレカット (既製孔)	25mm	903-25/10	902-25/10	901-25/10
	30mm	903-30/10	902-30/10	901-30/10
	35mm	903-35/10	902-35/10	901-35/10
	40mm		902-40/10	901-40/10
	45mm		902-45/10	901-45/10

コロストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



品 名		ノバ1 ミニフォールドアップ	ノバ1 フォールドアップ		ノバ1 マキシ フォールドアップ	
粘着面(mm)		85 × 85	100 × 100		125 × 125	
ストーマ袋サイズ(mm)		225 × 128	265 × 148		306 × 180	
凸型嵌め込み具の深さ		—	—		—	
装着期間目安		1-3日※1	1-3日※1		1-3日※1	
包装入数		10枚入	10枚入		10枚入	
価格(非課税)		5,000円	5,600円		8,200円	

カット	ストーマサイズ	製品番号				
		透明	肌色	透明	肌色	透明
フリーカット (自由開孔)	15-50mm	826-15/10	825-15/10			
	15-60mm			824-15/10	823-15/10	
	15-90mm					816-15※2
ブレカット (既製孔)	25mm			824-25/10	823-25/10	
	30mm			824-30/10	823-30/10	
	35mm			824-35/10	823-35/10	
	40mm			824-40/10	823-40/10	
	45mm			824-45/10		

コロストミー／イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。
※2 陰圧防止用シールが同封されています。



さらなる安心感 **別売品** 詳しくはP82

ベルトパック 85mm
(ワンピース用)

価格 1,760円(税込)
製品番号:09075-0000

※ノバ1 フォールドアップのみご使用できます





単品系装具ワンピース
ノバ1 フォールドアップ X5



さらなる安心感 **別売品** 詳しくはP82

ベルトパック 48mm
(ワンピース用)
価格 1,760円(税込)
製品番号:09076-0000



※ 25mm、30mm、35mmのみご使用できます

品 名		ノバ1 フォールドアップ X5	
粘着面(mm)		100 × 100	
ストーマ袋サイズ(mm)		265 × 148	
凸型嵌め込み具の深さ		—	
装着期間目安		1-5日※1	
包装入数		10枚入	
価格(非課税)		9,000円	
カット	ストーマサイズ	製品番号	
		透 明	肌 色
プレカット (自在孔)	25mm	882-25	
	30mm	882-30	881-30
	35mm	882-35	881-35
	40mm	882-40	
	45mm	882-45	

コロストミー／イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。




単品系装具ワンピース
ノバ1 フォールドアップ X3



品 名		ノバ1 フォールドアップ X3	
粘着面(mm)		100 × 100	
ストーマ袋サイズ(mm)		265 × 148	
凸型嵌め込み具の深さ		—	
装着期間目安		1-4日※1	
包装入数		10枚入	
価格(非課税)		8,500円	
カット	ストーマサイズ	製品番号	
		透 明	肌 色
フリーカット(自由開孔)	15-46mm	862-15	861-15
プレカット(自在孔)	25mm	862-25	861-25
	30mm	862-30	861-30
	35mm	862-35	861-35
	40mm	862-40	
	45mm	862-45	

コロストミー／イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

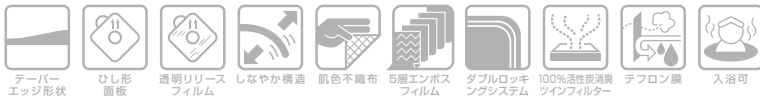

単品系装具ワンピース

ノバ1 フォールドアップ コンベックス



かたい凸6mm



閉鎖具内蔵



皮膚保護剤



装着期間目安



単品系装具ワンピース

ノバライフ1 TRE™ イレオストミー



平面



キャップ式排出口



皮膚保護剤



装着期間目安



品名		ノバ1 フォールドアップ コンベックス	
粘着面(mm)		100 × 100	
ストーマ袋サイズ(mm)		265 × 148	
凸型嵌め込み具の深さ		6mm	
装着期間目安		1-4日※1	
包装入数		10枚入	
価格(非課税)		9,300円	
カット	ストーマサイズ	製品番号	
		透明	肌色
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	842-24	841-24
	15-37mm	842-37	841-37
	15-46mm	842-46※2	841-46※2
ブレカット (既製孔)	20mm	842-20	841-20
	25mm	842-25	841-25
	30mm	842-30	841-30
	35mm	842-35	841-35

コロストミー／イレオストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

※2 粘着面115×115mm



テーパー
エッジ形状



ひし形
画板



透明リリース
フィルム



しなやか構造



肌色不織布



5層エンボス
フィルム



ダブルロック
システム



ベルトタブ付



100%活性炭消臭
ツインフィルター



テフロン膜



入浴可

さらなる安心感

別売品

詳しくはP82



ダンサックベルト

価格 770円(税込) サイズ:100cm

白 :製品番号:09000-0000

肌色 :製品番号:090-02

品名		ノバライフ1 TRE™ イレオストミー	
粘着面(mm)		106 × 125	
ストーマ袋サイズ(mm)		300 × 158	
凸型嵌め込み具の深さ		—	
装着期間目安		～3日※1	
包装入数		10枚入	
価格(非課税)		7,000円	
カット	ストーマサイズ	製品番号	
		透明	肌色
フリーカット (自由開孔)	15-70×90mm	3022-70	3021-70

消化管用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



テーパー
エッジ形状



楕円形
画板



透明リリース
フィルム



しなやか構造



肌色不織布



5層エンボス
フィルム



ノバライフ
フィルター



入浴可

広い口径で使いやすいキャップ式

- ・詰まりの可能性を低減し排出が早い内径16.5mmの排出口
- ・「ソフトタッチ」生地のストーマ袋で着用感と快適性を向上
- ・大容量(750ml)で排出頻度を軽減
- ・収納式キャップ(肌色のみ)



やわらかくて耐久性のあるソフトキャップ

- ・持ちやすく設計され、開閉しやすい栓を差し込むタイプでしっかり密閉
- ・繰り返しの使用でも安全
- ・消化管用ドレインネージバッグに、ひねるだけのロック式で直接しっかり接続



単品系器具ワンピース
ノバライフ1 TRE™
イレオストミー フィット



単品系器具ワンピース
ノバライフ1 TRE™
イレオストミー コンベックス



品名		ノバライフ1 TRE™ イレオストミー フィット	
粘着面 (mm)		110 × 130	
ストーマ袋サイズ (mm)		300 × 158	
凸型嵌め込み具の深さ		6mm	
装着期間目安		～4日※1	
包装入数		10枚入	
価格 (非課税)		8,000円	
カット	ストーマサイズ	製品番号	
		透明	肌色
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	3020-24	
	15-34mm	3020-34	3019-34
	15-44mm	3020-44	
	15-54mm	3020-54※2	3019-54※2
プレカット (既製孔)	25mm	3020-25	
	30mm	3020-30	
	35mm	3020-35	

消化管用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。
※2 粘着面150×127mm



さらなる安心感 別売品 詳しくはP82
ダンサックベルト 価格 770円(税込) サイズ:100cm
白:製品番号:09000-0000 肌色:製品番号:090-02



広い口径で使いやすいキャップ式
・詰まりの可能性を低減し排出が早い内径16.5mmの排出口
・「ソフトタッチ」生地のストーマ袋で着用感と快適性を向上
・大容量(750ml)で排出頻度を軽減
・収納式キャップ(肌色のみ)



やわらかくて耐久性のあるソフトキャップ
・持ちやすく設計され、開閉しやすい栓を差し込むタイプでしっかり密閉
・繰り返しの使用でも安全
・消化管用ドレインネージバッグに、ひねるだけのロック式で直接しっかり接続



品名		ノバライフ1 TRE™ イレオストミー コンベックス	
粘着面 (mm)		110 × 130	
ストーマ袋サイズ (mm)		300 × 158	
凸型嵌め込み具の深さ		6mm	
装着期間目安		～4日※1	
包装入数		10枚入	
価格 (非課税)		8,000円	
カット	ストーマサイズ	製品番号	
		透明	肌色
フリーカット (自由開孔)	15-37mm	3010-37	
	15-46mm	3010-46	3011-46
	15-59mm	3010-59※2	

消化管用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。
※2 粘着面150×127mm



さらなる安心感 別売品 詳しくはP82
ダンサックベルト 価格 770円(税込) サイズ:100cm
白:製品番号:09000-0000 肌色:製品番号:090-02



広い口径で使いやすいキャップ式
・詰まりの可能性を低減し排出が早い内径16.5mmの排出口
・「ソフトタッチ」生地のストーマ袋で着用感と快適性を向上
・大容量(750ml)で排出頻度を軽減
・収納式キャップ(肌色のみ)



やわらかくて耐久性のあるソフトキャップ
・持ちやすく設計され、開閉しやすい栓を差し込むタイプでしっかり密閉
・繰り返しの使用でも安全
・消化管用ドレインネージバッグに、ひねるだけのロック式で直接しっかり接続



単品系装具ワンピース
ノバ1 イレオストミー

平面

平面

キャップ式排出口

GX
親水性

1-3日

皮膚保護剤

装着期間目安



コロストミー

イレオストミー

ウロストミー

単品系装具ワンピース
ノバ1 イレオストミー X5

エックスファイブ

キャップ式排出口

GX
親水性

1-4日

皮膚保護剤

装着期間目安



コロストミー

イレオストミー

ウロストミー

品名				ノバ1 イレオストミー
粘着面(mm)				100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)				265 × 148
凸型嵌め込み具の深さ				—
装着期間目安				1-3日※1
クランプ				1個入
包装入数				5枚入
価格(非課税)				3,500円
カット	ストーマサイズ	カラー	製品番号	
フリーカット (自由開孔)	20-60mm	透明	822-20/5	

イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

テーバー
エッジ形状

ひし形
画板

透明リリース
フィルム

しなやか構造

肌色不織布

5層エンボス
フィルム

ダブルロック
ングシステム

100%活性炭消臭
ツインフィルター

テフロン膜

入浴可

クランプ

さらなる安心感 別売品
詳しくはP82



ベルトバック 85mm
(ワンピース用)
価格 1,760円(税込)
製品番号:09075-0000

品名			ノバ1 イレオストミー X5
粘着面(mm)			100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)			265 × 148
凸型嵌め込み具の深さ			—
装着期間目安			1-4日※1
クランプ			1個入
包装入数			10枚入
価格(非課税)			9,000円
カット	ストーマ サイズ	製品番号	
		透明	
プレカット (自在孔)	25mm	820-25	
	30mm	820-30	
	35mm	820-35	

イレオストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

テーバー
エッジ形状

ひし形
画板

透明リリース
フィルム

しなやか構造

肌色不織布

5層エンボス
フィルム

ダブルロック
ングシステム

100%活性炭消臭
ツインフィルター

テフロン膜

入浴可

クランプ

さらなる安心感 別売品
詳しくはP82

ベルトバック 48mm
(ワンピース用)
価格 1,760円(税込)
製品番号:09076-0000



単品系器具ワンピース

ノバ1 イレオストミー コンベックス



かたい凸6mm



キャップ式排出口



皮膚保護剤



装着期間目安



単品系器具ワンピース

ノバライフ1 TRE™ ウロストミー



平面



タップ式排出口



皮膚保護剤



装着期間目安



品 名		ノバ1 イレオストミー コンベックス
粘着面 (mm)		100 × 100
ストーマ袋サイズ (mm)		265 × 148
凸型嵌め込み具の深さ		6mm
装着期間目安		1-4日※1
クランプ		1個入
包装 入数		5枚入
価格 (非課税)		4,600円
カット	ストーマ サイズ	製品番号
		透 明
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	810-24
	15-37mm	810-37
	15-46mm	810-46※2
プレカット (既製孔)	25mm	810-25
	30mm	810-30
	35mm	810-35
	40mm	810-40※2

イレオストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。 ※2 粘着面 115×115mm



さらなる安心感

別売品

詳しくはP82



ダンサックベルト

価 格 770円(税込) サイズ:100cm
白 :製品番号:09000-0000
肌色 :製品番号:090-02

品 名		ノバライフ1 TRE™ ウロストミー	
粘着面 (mm)		89 × 105	
ストーマ袋サイズ (mm)		249 × 163	
凸型嵌め込み具の深さ		—	
装着期間目安		～3日※1	
包装 入数		10枚入※2	
価格 (非課税)		8,000円	
カット	ストーマ サイズ	製品番号	
		透 明	肌 色
フリーカット (自由開孔)	15-55×70mm	3492-15	3491-15
	25-55×70mm	3492-25	

ウロストミー用ストーマ袋


※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物や尿の性状等により異なります。

※2 アダプター 3個付



より安全・確実になったタップ式排出口

- ・目で見て触って開閉の確認ができる排出マークつき
- ・やわらかい触り心地
- ・排出時に尿の流量を調節可能なので安心
- ・安心なキャップつき
- ・ドレインチューブアダプターを使用すると
蓄尿バッグへの接続が簡単

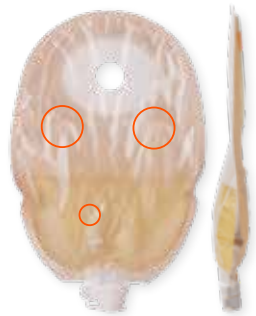

スリム・プロファイル

ポスチャーシールとふくらみ防止構造によって
ストーマ袋のふくらみを大幅に軽減

単品系装具ワンピース

ノバライフ1 TRE™ ウロストミー コンベックス



かたい凸6mm



タップ式排出口



皮膚保護剤



装着期間目安

単品系装具ワンピース

ノバライフ1 TRE™ ウロストミー フィット



やわらかい凸6mm



タップ式排出口



皮膚保護剤



装着期間目安



品名		ノバライフ1 TRE™ ウロストミー フィット
粘着面 (mm)		110 × 130
ストーマ袋サイズ (mm)		249 × 163
凸型嵌め込み具の深さ		6mm
装着期間目安		～4日※1
包装入数		10枚入※2
価格 (非課税)		11,000円
カット	ストーマサイズ	製品番号
		透明
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	3496-24
	15-34mm	3496-34
	15-44mm	3496-44
プレカット (既製孔)	25mm	3496-25
	30mm	3496-30

ウロストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物や尿の性状等により異なります。
※2 アダプター 3個付




さらなる安心感 別売品 詳しくはP82

ダンサックベルト 価格 770円(税込) サイズ:100cm
白:製品番号:09000-0000 肌色:製品番号:090-02



より安全・確実になったタップ式排出口

- ・目で見て触って開閉の確認ができる排出マークつき
- ・やわらかい触り心地
- ・排出時に尿の流量を調節可能なので安心
- ・安心なキャップつき
- ・ドレインチューブアダプターを使用すると蓄尿バッグへの接続が簡単

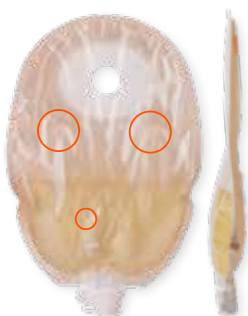

スリム・プロファイル

ポスチャーシールとふくらみ防止構造によってストーマ袋のふくらみを大幅に軽減

品名		ノバライフ1 TRE™ ウロストミー コンベックス
粘着面 (mm)		110 × 130
ストーマ袋サイズ (mm)		249 × 163
凸型嵌め込み具の深さ		6mm
装着期間目安		～4日※1
包装入数		10枚入※2
価格 (非課税)		11,000円
カット	ストーマサイズ	製品番号
		透明
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	3494-24
	15-37mm	3494-37
	15-46mm	3494-46
プレカット (既製孔)	25mm	3494-25
	30mm (☆～37mm)	3494-30

ウロストミー用ストーマ袋
※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物や尿の性状等により異なります。
※2 アダプター 3個付




さらなる安心感 別売品 詳しくはP82

ダンサックベルト 価格 770円(税込) サイズ:100cm
白:製品番号:09000-0000 肌色:製品番号:090-02



より安全・確実になったタップ式排出口

- ・目で見て触って開閉の確認ができる排出マークつき
- ・やわらかい触り心地
- ・排出時に尿の流量を調節可能なので安心
- ・安心なキャップつき
- ・ドレインチューブアダプターを使用すると蓄尿バッグへの接続が簡単

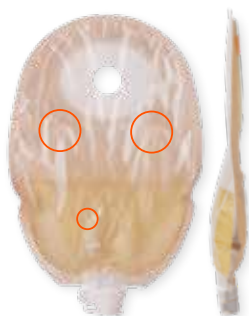

スリム・プロファイル

ポスチャーシールとふくらみ防止構造によってストーマ袋のふくらみを大幅に軽減

単品系装具ワンピース

ノバ1 ウロストミー コンベックス



かたい凸6mm



コック式排出口



皮膚保護剤



装着期間目安



単品系装具ワンピース

ノバ1 ウロストミー X3



エックススリー



コック式排出口



皮膚保護剤



装着期間目安

品名		ノバ1 ウロストミー X3
粘着面(mm)		100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)		245 × 150
凸型嵌め込み具の深さ		—
装着期間目安		1-3日※1
包装入数		10枚入※2
価格(非課税)		8,500円
カット	ストーマサイズ	製品番号 透 明
フリーカット(自由開孔)	12-46mm	892-12
ブレカット(自在孔)	20mm	892-20
	25mm	892-25
	30mm	892-30

ウロストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物や尿の性状等により異なります。

※2 アダプター 1個、キャップ 10個付。



排出マークと手で閉鎖確認可能

さらなる安心感 別売品 詳しくはP82

ベルトパック 85mm
(ワンピース用)

価格 1,760円(税込)
製品番号:09075-0000



品名		ノバ1 ウロストミー コンベックス
粘着面(mm)		100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)		245 × 150
凸型嵌め込み具の深さ		6mm
装着期間目安		1-3日※1
包装入数		10枚入※2
価格(非課税)		9,800円
カット	ストーマサイズ	製品番号 透 明
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	894-24
	15-37mm	894-37
ブレカット (既製孔)	20mm	894-20
	25mm	894-25
	30mm	894-30

ウロストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物や尿の性状等により異なります。

※2 アダプター 5個、キャップ 10個付。



排出マークと手で閉鎖確認可能

さらなる安心感 別売品 詳しくはP82

ダンサックベルト

価格 770円(税込)

サイズ:100cm

白 :製品番号:09000-0000

肌色 :製品番号:090-02



平面

平面

GX

親水性

皮膚保護剤

1時間-2日

装着期間目安

単品系装具ワンピース
ノバ1 ミニキャップ



品 名		ノバ1 ミニキャップ
粘着面 (mm)		φ 92
ストーマ袋サイズ (mm)		φ 105
凸型嵌め込み具の深さ		—
装着期間目安		1 時間-2 日※1
包装 入数		10 枚入
価格 (非課税)		2,600 円
カット	ストーマ サイズ	製品番号
		肌 色
プレカット (既製孔)	30mm	829-30/10
	40mm	829-40/10
	50mm	829-50/10

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

透明リリース
フィルム

しなやか構造

肌色不織布

100%活性炭消臭
ツインフィルター
(撥水性膜なし)

入浴可

単品系装具ワンピース
ノバ1 インファント ドレイン(小児用)

平面

平面

下部開放型

GX

親水性

皮膚保護剤

1-2日

装着期間目安



品 名		ノバ1 インファント ドレイン※1
粘着面 (mm)		70 × 70
ストーマ袋サイズ (mm)		208 × 111
凸型嵌め込み具の深さ		—
装着期間目安		1-2 日※2
ソフトワイヤータイ		10 本入
包装 入数		10 枚入
価格 (非課税)		4,000 円
カット	ストーマ サイズ	製品番号
		透 明
フリーカット (自由開孔)	0-40mm※3	818-00/10
	10-40mm	818-10/10

※1 インファント ドレインには、フィルターはついておりません。
※2 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。
※3 初孔なし

テーパ
エッジ形状

ひし形
面板

透明リリース
フィルム

しなやか構造

肌色不織布

5層エンボス
フィルム

ダブルロッキ
ングシステム

入浴可

ソフト
ワイヤータイ

二品系装具 ツープース Two Piece

ノバライフ2 ^{トレイ} TRE™ シリーズ
ノバライフ2 シリーズ
ノバ2 シリーズ





二品系装具ツープース
ノバライフ2 TRE™ フィット リング



品 名			ノバライフ2 TRE™ フィット リング
凸型嵌め込み具の深さ			6 mm
装着期間目安			～6 日※1
包装 入数			5 枚入
価 格（非課税）			4,550 円
フランジサイズ（粘着面）	カット	ストーマサイズ	製 品 番 号
■ 43mm（116×98mm）	フリーカット	15-25mm	3343-15
	プレカット	25 mm	3343-25
■ 55mm（130×110mm）	フリーカット	15-38mm	3355-15
	プレカット	30 mm	3355-30
		35 mm	3355-35
■ 70mm（150×127mm）	フリーカット	15-52mm	3370-15

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



二品系装具ツープース
ノバライフ2 TRE™ リング



品 名			ノバライフ2 TRE™ リング
凸型嵌め込み具の深さ			—
装着期間目安			～5 日※1
包装 入数			5 枚入
価 格（非課税）			4,000 円
フランジサイズ（粘着面）	カット	ストーマサイズ	製 品 番 号
■ 36mm（85×72mm）	フリーカット	15-28mm	3136-15
■ 43mm（105×89mm）	フリーカット	15-35mm	3143-15
	プレカット	25 mm	3143-25
		30 mm	3143-30
■ 55mm（105×89mm）	フリーカット	15-47mm	3155-15
	プレカット	35 mm	3155-35
		40 mm	3155-40
■ 70mm（125×106mm）	フリーカット	15-62mm	3170-15

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



平面
平面

GX
親水性
皮膚保護剤

1・4日
装着期間目安

二品系装具ツープース

ノバライフ2 リング

HARD
かたい凸6mm

ノバライフ
TRE™
皮膚保護剤

~6日
装着期間目安

二品系装具ツープース

ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング



品 名			ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング
凸型嵌め込み具の深さ			6mm
装着期間目安			～6日※1
包装 入数			5枚入
価格（非課税）			5,250円
フランジサイズ （粘着面）	カット	ストーマ サイズ	製品番号
36mm（107×91mm）	フリーカット	15-23mm	3236-15
43mm（116×98mm）	フリーカット	15-30mm	3243-15
	プレカット	25mm	3243-25
	プレカット	30mm	3243-30
55mm（130×110mm）	フリーカット	15-42mm	3255-15
	プレカット	35mm	3255-35
		40mm	3255-40
70mm（150×127mm）	フリーカット	15-59mm	3270-15

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



品 名			ノバライフ2 リング
凸型嵌め込み具の深さ			—
装着期間目安			1-4日※1
包装 入数			5枚入
価格（非課税）			3,900円
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
36mm（85×72mm）	フリーカット	10-28mm	1736-10
	プレカット	20mm	1736-20
	プレカット	25mm	1736-25
43mm（105×89mm）	フリーカット	10-35mm	1743-10
	プレカット	25mm	1743-25
		30mm	1743-30
55mm（105×89mm）	フリーカット	10-47mm	1755-10
	プレカット	35mm	1755-35
		40mm	1755-40
70mm（125×106mm）	フリーカット	10-62mm	1770-10
	プレカット	45mm	1770-45
		50mm	1770-50

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。





排出口閉鎖型

ノバライフ2 ミニクローズ
ノバライフ2 クローズ



閉鎖具内蔵

二品系 装具 ツーピース

ノバライフ2 ミニオープン
ノバライフ2 オープン
ノバライフ2 マキシ オープン



かたい凸6mm



親水性
皮膚保護剤



装着期間目安

二品系 装具 ツーピース

ノバライフ2 コンベックス リング



ノバライフ2
ミニオープン

ノバライフ2
オープン

ノバライフ2
マキシ オープン

ノバライフ2
ミニクローズ

ノバライフ2
クローズ


品 名			ノバライフ2 コンベックス リング
凸型嵌め込み具の深さ			6mm
装着期間目安			1-4日※1
包装入数			5枚入
価格(非課税)			4,650円
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
36mm (107×91mm)	フリーカット	10-23mm	1936-10
	プレカット	20mm	1936-20
		23mm	1936-23
43mm (116×98mm)	フリーカット	10-30mm	1943-10
	プレカット	25mm	1943-25
		30mm	1943-30
55mm (130×110mm)	フリーカット	10-42mm	1955-10
	プレカット ☆最大有効径	35mm (☆~42mm)	1955-35
		40mm	1955-40
70mm (150×127mm)	フリーカット	10-59mm	1970-10
	プレカット ☆最大有効径	40mm (☆~59mm)	1970-40
		45mm (☆~59mm)	1970-45

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



品 名		ノバライフ2 ミニオープン	ノバライフ2 オープン	ノバライフ2 マキシ オープン
ストーマ袋サイズ		220×132mm	239×144mm	259×158mm
包装入数		10枚入	10枚入	10枚入
価格(非課税)		3,800円	4,100円	4,400円
フランジサイズ	カラー	製品番号		
36mm	透明	1320-36/10	1316-36/10	
	肌色	1319-36/10	1315-36/10	
43mm	透明	1320-43/10	1316-43/10	1322-43/10
	肌色	1319-43/10	1315-43/10	1321-43/10
55mm	透明	1320-55/10	1316-55/10	1322-55/10
	肌色	1319-55/10	1315-55/10	1321-55/10
70mm	透明		1316-70/10	1322-70/10
	肌色		1315-70/10	1321-70/10

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

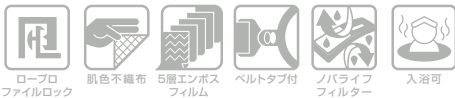

さらなる安心感 別売品 詳しくはP82

ダンサックベルト 価格770円(税込) サイズ:100cm
白:製品番号:09000-0000 肌色:製品番号:090-02



平面
平面

GX
親水性
皮膚保護剤

1・4日
装着期間目安

二品系装具ツーピース
ノバ2 リング

キャップ式排出口

二品系装具ツーピース
ノバライフ2 イレオストミー



広い口径で使いやすいキャップ式

- ・詰まりの可能性を低減し排出が早い内径16.5mmの排出口
- ・「ソフトタッチ」生地のスーマ袋で着用感と快適性を向上
- ・大容量(850ml)で排出頻度を軽減
- ・収納式キャップ(肌色のみ)



やわらかくて耐久性のあるソフトキャップ

- ・持ちやすく設計され、開閉しやすい栓を差し込むタイプでしっかり密閉
- ・繰り返しの使用でも安全
- ・消化管用ドレインネージバッグに、ひねるだけのロック式で直接しっかり接続



品 名			ノバ2 リング
凸型嵌め込み具の深さ			—
装着期間目安			1-4日※1
包装 入数			5 枚入
価 格 (非 課 税)			3,900 円
フランジサイズ(粘着面)	カット	スーマサイズ	製 品 番 号
36mm (85×85mm)	フリーカット	12-28mm	1136-12
		15-28mm	1136-15
	プレカット	20mm	1136-20
43mm (100×100mm)	フリーカット	25mm	1136-25
		30mm	1136-30
	プレカット	35mm	1136-35
55mm (100×100mm)	フリーカット	40mm	1136-40
		45mm	1136-45
	プレカット	50mm	1136-50
70mm (115×115mm)	フリーカット	55-62mm	1136-55

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

テーパード
エッジ形状

ひし形
裏紙

透明リリース
フィルム

セミフィクス
フランジ

ロープロ
ファイルロック

しなやか構造

入浴可

品 名	ノバ2 イレオストミー	
スーマ袋サイズ(mm)	300 × 158	
包装 入数	10 枚入	
価 格 (非 課 税)	5,500 円	
フランジサイズ	製 品 番 号	
	透 明	肌 色
43mm	1308-55	1307-43
55mm		1307-55
70mm	1308-70	1307-70

消化管用スーマ袋

ロープロ
ファイルロック

肌色不織布

5層エンボス
フィルム

逆流防止機構

ベルトタブ付

ノバライフ
フィルム

入浴可

さらなる安心感 別売品 詳しくはP82

ダンサックベルト 価格770円(税込) サイズ:100cm
白:製品番号:09000-0000 肌色:製品番号:090-02





二品系装具ツーピース
ノバ2 X5 リング



二品系装具ツーピース
ノバ2 X3 リング



品 名				ノバ2 X5 リング
凸型嵌め込み具の深さ				—
装着期間目安				1-5 日※1
包装 入数				5 枚入
価格 (非課税)				4,250 円
フランジサイズ (粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号	
■ 43mm (100×100mm)	フリーカット	15-30mm	1343-15	
	プレカット	25mm	1343-25	
■ 55mm (115×115mm)	フリーカット	15-42mm	1355-15	
	プレカット	32mm	1355-32	
		35mm	1355-35	

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



品 名				ノバ2 X3 リング
凸型嵌め込み具の深さ				—
装着期間目安				1-4 日※1
包装 入数				5 枚入
価格 (非課税)				4,000 円
フランジサイズ (粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号	
■ 43mm (100×100mm)	フリーカット	15-30mm	1343-15	
	プレカット	25mm	1343-25	
■ 55mm (115×115mm)	フリーカット	15-42mm	1355-15	
	プレカット	32mm	1355-32	
		35mm	1355-35	

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。





二品系装具ツーピース

ノバ2 ミニフォールドアップ
ノバ2 フォールドアップ



ノバ2 ミニフォールドアップ



ノバ2 フォールドアップ

品 名		ノバ2 コンベックス リング	
凸型 嵌め込み具の深さ		6mm	
装着期間目安		1-4日※1	
包装 入数		5枚入	
価 格 (非 課 税)		4,600円	
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
■ 36mm (100×100mm)	フリーカット	15-23mm	1536-15
	プレカット	20mm	1536-20
		23mm	1536-23
■ 43mm (100×100mm)	フリーカット	15-30mm	1543-15
	プレカット	25mm	1543-25
		30mm	1543-30
■ 55mm (115×115mm)	フリーカット	15-42mm	1555-15
	プレカット	35mm	1555-35
		40mm	1555-40

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



品 名	ノバ2 ミニフォールドアップ	ノバ2 フォールドアップ	
ストーマ袋サイズ(mm)	225 × 128	265 × 148	
包 装 入 数	10 枚入	10 枚入	
価 格 (非 課 税)	3,400円	3,700円	
フランジサイズ	製 品 番 号		
	肌 色	透 明	肌 色
■ 36mm	1219-36	1216-36	1215-36
■ 43mm	1219-43	1216-43	1215-43
■ 55mm	1219-55	1216-55	1215-55
■ 70mm		1216-70	1215-70

コロストミー／イレオストミー用ストーマ袋



さらなる安心感 別売品 詳しくはP82



ダンサックベルト
価 格 770円(税込) サイズ:100cm
白 :製品番号:09000-0000
肌色 :製品番号:090-02

二品系器具ツープース
ノバ2 イレオストミー



品 名	ノバ2 イレオストミー	
ストーマ袋サイズ(mm)	294 × 155	
クランプ	1 個入	
包装 入数	10 枚入	
価格 (非課税)	5,500 円	
フランジサイズ	製品番号	
	透 明	肌 色
■ 43mm	1208-43	1207-43
■ 55mm	1208-55	1207-55
■ 70mm	1208-70	1207-70

イレオストミー用ストーマ袋



さらなる安心感 別売品 詳しくはP82



ダンサックベルト
価 格 770 円(税込) サイズ:100cm
白 :製品番号:09000-0000
肌色 :製品番号:090-02

二品系器具ツープース
ノバライフ2 ウロストミー



品 名	ノバライフ2 ウロストミー	
ストーマ袋サイズ(mm)	249 × 163	
包装 入数	10 枚入※1	
価格 (非課税)	5,900 円	
フランジサイズ	製品番号	
	透 明	肌 色
■ 36mm	1418-36	
■ 43mm	1418-43	1417-43
■ 55mm	1418-55	1417-55

ウロストミー用ストーマ袋
※1 アダプター 3個付




さらなる安心感 別売品 詳しくはP82

ダンサックベルト 価 格 770 円(税込) サイズ:100cm
白:製品番号:09000-0000 肌色:製品番号:090-02



より安全・確実になったタップ式排出口

- ・目で見て触って開閉の確認ができる排出マークつき
- ・やわらかい触り心地
- ・排出時に尿の流量を調節可能なので安心
- ・安心なキャップつき
- ・ドレインチューブアダプターを使用すると蓄尿バッグへの接続が簡単

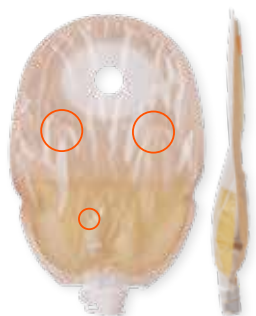

スリム・プロファイル

ポスチャーシールとふくらみ防止構造によってストーマ袋のふくらみを大幅に軽減

二品系器具ツープース
ノバ2 ウロストミー



コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



Naturally skin friendly products
Designed for security and ease of use, making life easier for everyone involved



品名	ノバ2 ウロストミー	
ストーマ袋サイズ(mm)	245 × 150	
包装入数	10枚入※1	
価格(非課税)	6,100円	
フランジサイズ	製品番号	
	透明	肌色
■ 36mm	1218-36	1217-36
■ 43mm	1218-43	1217-43
■ 55mm	1218-55	1217-55



排出マークと手で閉鎖確認可能

ウロストミー用ストーマ袋
※1 アダプター1個、キャップ10個付。



さらなる安心感 別売品 詳しくはP82

ダンサックベルト 価格770円(税込) サイズ:100cm
白:製品番号:09000-0000 肌色:製品番号:090-02



アクセサリー

Dansac Accessories



ストーマ周囲皮膚や腹壁の状態に合わせて、しわやくぼみを補正する皮膚保護剤、装具交換時に便利なティッシュ消臭液など、ストーマ造設者に、より快適な生活を送っていただけるようなアクセサリーをそろえました。

用手成形皮膚保護剤
トレイ™ シール

比類なき3つの特性を持つ
次世代型皮膚保護剤。

POINT

- 初期タック、粘着力、耐久性に優れた用手成形皮膚保護剤です。
- 赤ちゃんのおむつにも使用されている吸水素材を採用しているため、お肌の水分量バランスを正常に保ちます。
- 万が一排泄物の潜り込みが発生しても、皮膚障害が起こりにくい即効性のpH緩衝作用があります。



お求めやすい3枚入り



品 名	トレイ™ シール 98mm
価 格	2,244円(税込)／2,040円(税抜)
包 装	3枚／箱
規 格	厚さ2.3mm×外径98mm×内径18mm
製品番号	072-98

皮膚保護剤成分：フルイドPIB／液体PIB／ポリエチレン繊維(PEファイバー)／カルボキシビニルポリマー(カルボマー)／ポリアクリル酸ナトリウム

品 名	トレイ™ シール 57mm(内径27mm)
価 格	3,740円(税込)／3,400円(税抜)
包 装	10枚／箱
規 格	厚さ2.3mm×外径57mm×内径27mm
製品番号	072-57

皮膚保護剤成分：フルイドPIB／液体PIB／ポリエチレン繊維(PEファイバー)／カルボキシビニルポリマー(カルボマー)／ポリアクリル酸ナトリウム



57mmサイズは1枚貼りが可能



48mmサイズは1枚貼りが可能

品 名	トレイ™ シール 48mm(リングタイプ)
価 格	3,740円(税込)／3,400円(税抜)
包 装	10枚／箱
規 格	厚さ2.3mm×外径48mm×内径18mm
製品番号	072-48

皮膚保護剤成分：フルイドPIB／液体PIB／ポリエチレン繊維(PEファイバー)／カルボキシビニルポリマー(カルボマー)／ポリアクリル酸ナトリウム

リング状皮膚保護剤
GXトラシール

お肌にやさしいGX親水性皮膚保護剤を
使用した、リング状皮膚保護剤。

POINT

- 弱酸性のお肌に非常に近いpH値5.2になるように設計しています。

品 名	GXトラシール	品 名	GXトラシール 10枚入
価 格	11,220円(税込)／10,200円(税抜)	価 格	4,070円(税込)／3,700円(税抜)
包 装	30枚／箱	包 装	10枚／箱
厚 さ	2.5mm	厚 さ	2.5mm
製品番号	内径 20mm 725-20/30	製品番号	内径 20mm 725-20/10
	内径 30mm 725-30/30		内径 30mm 725-30/10
	内径 40mm 725-40/30		内径 40mm 725-40/10
	内径 50mm 725-50/30		内径 50mm 725-50/10



面板外周部用シール

ダンサック
バリアエクステンダー

面板外周部のはがれや浮きが気になる部分に
使用することで漏れを防ぎます。

POINT

- お肌に優しい「ハイドロコロイド」素材のシールです。
- コンパクトなサイズで必要な部分にのみ貼ることができます。

品 名	ダンサック バリアエクステンダー
価 格	2,805円(税込)／2,550円(税抜)
包 装	30枚／箱
規 格	長さ12.8cm×幅4.0cm
製品番号	075-30



練状皮膚保護剤

ソフトペースト

ストーマ周囲の皮膚のしわやくぼみに
密着して排泄物の漏れを防ぎます。

POINT

- 皮膚保護剤下での漏れを軽減しお肌を保護します。
- 乾燥した皮膚へ、または皮膚保護剤へ直接貼付することが可能です。
- より多くの保護素材が必要な場合に、トレイ™シールまたはGXトラシールと一緒に使用が可能です。

品 名	ソフトペースト
価 格	2,200円(税込)／2,000円(税抜)
包 装	1本／箱
容 量	50g
製品番号	77550-0
※アルコール含有	



消臭液

ダンサック消臭液ノドールS

ストーマ袋の交換時や排出時に排泄物から生じる臭いを中和する消臭液。

POINT

- 排泄物のにおいを効果的に中和する、無臭・無色の消臭液です。
- 食べ物や個人差によって効果が異なる場合がありますので、必要に応じて滴下量を増やしてください。
- ボトルタイプで、50mlと250mlがあります。

品 名	ダンサック消臭液ノドールS (50ml)	ダンサック消臭液ノドールS (250ml)
価 格	2,750 円(税込)／2,500 円(税抜)	8,250 円(税込)／7,500 円(税抜)
包 装	1 本／箱	1 本／箱
容 量	50ml	250ml
製品番号	080-00	080-01

※使用方法:使用前に袋内に6～10滴垂らす
※本製品のサンプル提供はいたしていません。




清拭用品

スキンティッシュ

ストーマ周囲の皮膚を清潔にするためのティッシュ。

POINT 1枚ずつパックになっており外出や旅行に最適です。

品 名	スキンティッシュ
価 格	3,080 円(税込)／2,800 円(税抜)
包 装	50 枚／箱
製品番号	71000-0000
主な成分: 精製水／エタノール(10%)／亜麻仁油(1%)／香料	

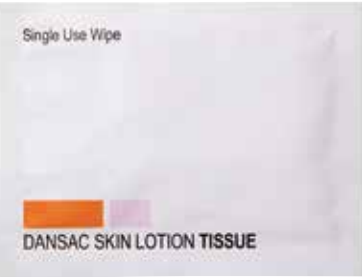

閉鎖具

クランプ

閉鎖具

ソフトワイヤータイ

POINT

ハサミのようにストーマ袋のすそを挟んで閉鎖します。



品 名	クランプ
価 格	2,613 円(税込)／2,375 円(税抜)
包 装	25 個／箱
製品番号	092-00

POINT

ストーマ袋のすそに貼り、ソフトワイヤータイに4回巻き付け、左右のワイヤーを折り曲げて閉鎖します。

※ドレインタイプの製品には付属品として入っていますが、一部の製品には入っていないので、ご注意ください。



品 名	ソフトワイヤータイ
価 格	1,705 円(税込)／1,550 円(税抜)
包 装	50 本／箱
製品番号	095-02

排液バッグ

ドレインネージバッグ 消化管用


さまざまな性状の排泄物に対応

POINT

- 直径15mmで表面が波形のチューブがねじれやよじれを防ぎ、詰まりを防ぎます。
- 大容量でバッグから排出する頻度を最小限に。
- 大きな排出口で簡単に早く排出できます。
- 消化管用キャップ式のストーマ袋に、ひねるだけのロック式で直接しっかりと接続できます。

品 名	ドレインネージバッグ 消化管用
価 格	6,380 円(税込)／5,800 円(税抜)
包 装	10 枚入
サイズ	直径15mm × 長さ152.4cm
容 量	2,000ml
製品番号	450-00

※開けて空にしてもまた閉じることができます。
※一般的な蓄尿袋への接続をする場合に専用のコネクターが必要になります。【ホリスターアクセサリ「キャップのシリーズ専用コネクター」製品番号:7332】… P103

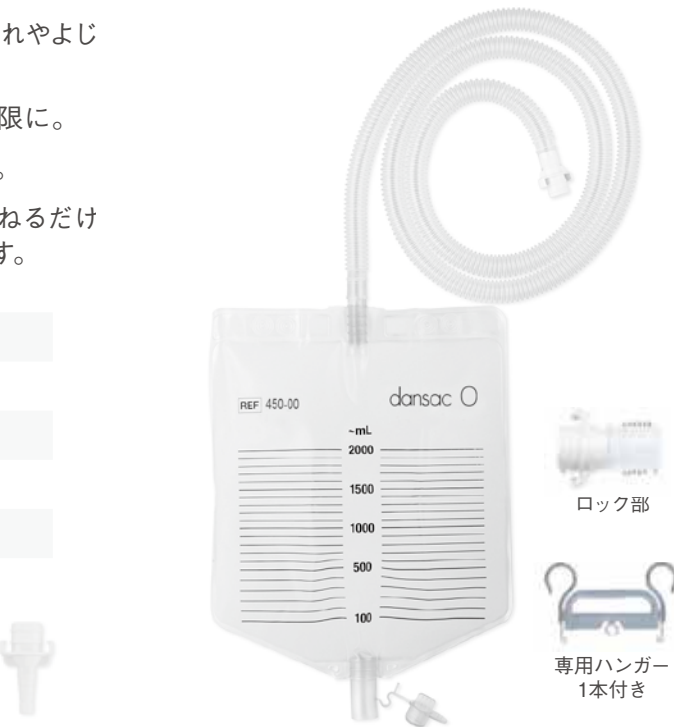

排液バッグ

ドレインネージバッグ 尿路用

POINT

- 夜間用として最適な採尿バッグです。
- 安心な2,000mlの大容量です。
- アダプターを使用せずに、直接ダンサックウロストミーストーマ袋に接続できます。
- 尿が逆戻りしない逆流防止弁付きです。
※本製品のサンプル提供はいたしていません。

品 名	ドレインネージバッグ 尿路用
価 格	7,700 円(税込)／7,000 円(税抜)
包 装	10 枚入
サイズ	295mm×210mm
容 量	2,000ml
製品番号	420-00



接続管

ドレインチューブアダプター

POINT

ダンサックウロストミーストーマ袋と一般的な採尿バッグを接続するアダプターです。

※ダンサックのドレインネージバッグをご使用の際は不要です

品 名	ドレインチューブアダプター
価 格	4,950 円(税込)／4,500 円(税抜)
包 装	10 個入
製品番号	400-50



ベルト
ダンサックベルト

ベルトの使用により、
ストーマ袋の装着をさらに安定させます。

POINT

- ストーマ袋の装着をさらに安定させます。
- ベルトプレートや、ストーマ袋に付いているベルトタブに掛けて使用します。
- ベルトの色は白と肌色の2種類で長さは100cmです。

品 名	ダンサックベルト		
価 格	770円(税込)／700円(税抜)		
長 さ	100cm		
規 格	58cm～109cm		
製品番号	白	09000-0000	
	肌色	090-02	

※本製品のサンプル提供はいたしていません。



ベルト
ベルトパック85・48mm
(ワンピース用)

ベルトとベルトプレートをセットにした
ワンピース用のベルトパックでさらに安心。

POINT

- ワンピースのストーマ袋に装着し、装具を安定させます。
- ベルトプレートは内径85mmと内径48mmの2種類があります。



品 名	ベルトパック 85mm		
価 格	1,760 円 (税込)／1,600 円(税抜)		
内 容	ベルトプレート 5 枚／ベルト 1 本(白)		
製品番号	09075-0000		
適 応 製 品	ノバ1 フォールドアップ	P41	
	ノバ1 フォールドアップ X3 フリーカット	P42	
	ノバ1 イレオストミー	P48	
	ノバ1 ウロストミー X3	P54	

※本製品のサンプル提供はいたしていません。

品 名	ベルトパック48mm				
価 格	1,760 円 (税込)／1,600 円(税抜)				
内 容	ベルトプレート5枚／ベルト1本(肌色)				
製品番号	09076-0000				
適 応 製 品	ノバ1 25mm	フォールドアップ 30mm	X3 35mm	プレカット	P42
	ノバ1 25mm	フォールドアップ 30mm	X5 35mm		P43
	ノバ1 25mm	イレオストミー 30mm	X5 35mm		P49

※本製品のサンプル提供はいたしていません。

Index 製品一覧 [装具]

ストーマの種類	装具の種類	製品名称	規格		貼付 日数 目安	製品番号			標準 価格 (非課税)	ページ	備考
						透明	肌色	光 透 透			
コロストミー イレオストミー	単品系	ノバライフ1 TRE TM ミニ	フリー カット	15-38×50mm (タテ×ヨコ)	～5日	3026-15/10	3025-15/10		5,800	P34	
		ノバライフ1 TRE TM	フリー カット	15-55×70mm (タテ×ヨコ)	～5日	3024-15/10	3023-15/10	○	6,000	P34	
			プレ カット	25mm	～5日	3024-25/10	3023-25/10	○	6,000		
				30mm	～5日	3024-30/10	3023-30/10	○	6,000		
				35mm	～5日	3024-35/10	3023-35/10	○	6,000		
				40mm	～5日	3024-40/10	3023-40/10	○	6,000		
				45mm	～5日	3024-45/10	—		6,000		
		ノバライフ1 TRE TM マキシ	フリー カット	15-55×70mm (タテ×ヨコ)	～5日	3018-15	3017-15	○	6,000	P34	
			プレ カット	15-70×90mm (タテ×ヨコ)	～5日	3016-15	3015-15	○	7,000		
				25mm	～5日	3018-25	3017-25	○	6,000		
				30mm	～5日	3018-30	3017-30	○	6,000		
		ノバライフ1 TRE TM フィット	フリー カット	15-24mm	～6日	3082-24	3081-24	○	9,500	P35	
			プレ カット	15-34mm	～6日	3082-34	3081-34	○	9,500		
				25mm	～6日	3082-25	3081-25	○	9,500		
				30mm	～6日	3082-30	3081-30	○	9,500		
				35mm	～6日	3082-35	3081-35	○	9,500		
				40mm	～6日	3082-40	3081-40	○	9,500		
		ノバライフ1 TRE TM フィット マキシ	フリー カット	15-34mm	～6日	3084-34	3083-34	○	9,500	P35	
			プレ カット	15-44mm	～6日	3082-44	3081-44	○	9,500		
				15-54mm	～6日	3082-54	3081-54	○	9,500		
				25mm	～6日	3084-25	3083-25	○	9,500		
				30mm	～6日	3084-30	3083-30	○	9,500		
				35mm	～6日	3084-35	3083-35	○	9,500		
				40mm	～6日	3082-40	3081-40	○	9,500		
				45mm	～6日	3082-45	3081-45	○	9,500		
			フリー カット	15-24mm	～6日	3042-24	—		9,900		
				15-24mm	～6日	3046-24	3045-24	○	9,900	P36	
		ノバライフ1 TRE TM コンベックス	フリー カット	15-37mm	～6日	3042-37	3041-37	○	9,900		
				15-46mm	～6日	3042-46	3041-46	○	9,900		
				25mm	～6日	3046-25	3045-25	○	9,900		
			プレ カット	30mm 最大有効径 37mm	～6日	3042-30	3041-30	○	9,900		
				35mm	～6日	3042-35	3041-35	○	9,900		
				40mm 最大有効径 46mm	～6日	3042-40	3041-40	○	9,900		
		ノバライフ1 TRE TM コンベックス マキシ	フリー カット	15-59mm	～6日	3042-59	3041-59	○	9,900	P36	
		ノバライフ1 ミニ	フリー カット	10-38×50mm	1-3日	926-10/10	925-10/10		5,600	P37	
		ノバライフ1	フリー カット	10-55×70mm	1-3日	924-10/10	923-10/10		6,100	P37	
			プレ カット	25mm	1-3日	924-25/10	923-25/10		6,100		
				30mm	1-3日	924-30/10	923-30/10		6,100		
				35mm	1-3日	924-35/10	923-35/10		6,100		
				40mm	1-3日	924-40/10	923-40/10		6,100		
				45mm	1-3日	924-45/10	—		6,100		

Index 製品一覧 [装具]

ストーマの種類	装具の種類	製品名称	規格	貼付 日数 目安	製品番号			標準 価格 (非課税)	ページ	備考
					透明	肌色	あんしん窓			
コロストミー イレオストミー	単品系	ノバライフ1 マキシ	フリー カット	10-70×90mm	1-3日	916-10/10	915-10/10	7,100	P37	
			ブレ カット	25mm	1-3日	916-25/10	—	7,100		
				30mm	1-3日	916-30/10	915-30/10	7,100		
				35mm	1-3日	916-35/10	915-35/10	7,100		
		ノバライフ1 フィット	フリー カット	15-24mm	1-4日	982-24	981-24	○ 8,700	P38	
				15-34mm	1-4日	982-34	981-34	○ 8,700		
			ブレ カット	25mm	1-4日	982-25	981-25	○ 8,700		
				30mm	1-4日	982-30	981-30	○ 8,700		
		ノバライフ1 フィット マキシ	フリー カット	15-24mm	1-4日	984-24	983-24	○ 8,700	P38	
				15-34mm	1-4日	984-34	983-34	○ 8,700		
				15-44mm	1-4日	982-44	981-44	○ 8,700		
				15-54mm	1-4日	982-54	981-54	○ 8,700		
				25mm	1-4日	984-25	983-25	○ 8,700		
			ブレ カット	30mm	1-4日	984-30	983-30	○ 8,700		
				35mm	1-4日	984-35	983-35	○ 8,700		
				40mm	1-4日	982-40	981-40	○ 8,700		
				45mm	1-4日	982-45	981-45	○ 8,700		
		ノバライフ1 コンベックス ミニ	フリー カット	10-24mm	1-4日	942-24	—	9,300	P39	
			ブレ カット	20mm 最大有効径 24mm	1-4日	942-20	—	9,300		
				25mm	1-4日	942-25	941-25	9,300		
		ノバライフ1 コンベックス	フリー カット	10-37mm	1-4日	942-37	941-37	9,300	P39	
				10-46mm	1-4日	942-46	941-46	9,300		
			ブレ カット	30mm 最大有効径 37mm	1-4日	942-30	941-30	9,300		
				35mm	1-4日	942-35	941-35	9,300		
				40mm 最大有効径 46mm	1-4日	942-40	941-40	9,300		
				45mm	1-4日	942-45	941-45	9,300		
		ノバライフ1 コンベックス マキシ	フリー カット	10-59mm	1-4日	942-59	941-59	9,300	P39	
			ブレ カット	50mm 最大有効径 59mm	1-4日	942-50	941-50	9,300		
コロストミー		ノバライフ1 ミニクローズ	フリー カット	10-38×50mm	1-3日	—	903-10/10	4,000	P40	
				25mm	1-3日	—	903-25/10	4,000		
			ブレ カット	30mm	1-3日	—	903-30/10	4,000		
				35mm	1-3日	—	903-35/10	4,000		
		ノバライフ1 クローズ	フリー カット	10-55×70mm	1-3日	902-10/10	901-10/10	4,000	P40	
				25mm	1-3日	902-25/10	901-25/10	4,000		
			ブレ カット	30mm	1-3日	902-30/10	901-30/10	4,000		
				35mm	1-3日	902-35/10	901-35/10	4,000		
				40mm	1-3日	902-40/10	901-40/10	4,000		
				45mm	1-3日	902-45/10	901-45/10	4,000		
コロストミー イレオストミー		ノバ1 ミニ フォールドアップ	フリー カット	15-50mm	1-3日	826-15/10	825-15/10	5,000	P41	

ストーマの 種類	装具の 種類	製 品 名 称	規 格		貼 付 日 数 目 安	製 品 番 号		標 準 価 格 (非課税)	ペー ジ	備 考
						透 明	肌 色			
コロストミー イレオストミー	単品系	ノバ1 フォールドアップ	フリー カット	15-60mm	1-3日	824-15/10	823-15/10	5,600	P41	
			ブレ カット	25mm	1-3日	824-25/10	823-25/10	5,600		
				30mm	1-3日	824-30/10	823-30/10	5,600		
				35mm	1-3日	824-35/10	823-35/10	5,600		
				40mm	1-3日	824-40/10	823-40/10	5,600		
				45mm	1-3日	824-45/10	—	5,600		
		ノバ1 マキシ フォールドアップ	フリー カット	15-90mm	1-3日	816-15	—	8,200	P41	
		ノバ1 フォールドアップ X3	フリー カット	15-46mm	1-4日	862-15	861-15	8,500	P42	リング状皮膚 保護剤内蔵
			ブレ カット	25mm	1-4日	862-25	861-25	8,500		最大5mm 指で伸ばせます リング状皮膚 保護剤内蔵
				30mm	1-4日	862-30	861-30	8,500		
				35mm	1-4日	862-35	861-35	8,500		
				40mm	1-4日	862-40	—	8,500		
				45mm	1-4日	862-45	—	8,500		
		ノバ1 フォールドアップ X5	ブレ カット	25mm	1-5日	882-25	—	9,000	P43	最大7mm 指で伸ばせます リング状皮膚 保護剤内蔵
				30mm	1-5日	882-30	881-30	9,000		
				35mm	1-5日	882-35	881-35	9,000		
				40mm	1-5日	882-40	—	9,000		
				45mm	1-5日	882-45	—	9,000		
		ノバ1 フォールドアップ コンベックス	フリー カット	15-24mm	1-4日	842-24	841-24	9,300	P44	
				15-37mm	1-4日	842-37	841-37	9,300		
				15-46mm	1-4日	842-46	841-46	9,300		
			ブレ カット	20mm	1-4日	842-20	841-20	9,300		
				25mm	1-4日	842-25	841-25	9,300		
				30mm	1-4日	842-30	841-30	9,300		
				35mm	1-4日	842-35	841-35	9,300		
イレオストミー	ノバライフ1 ^{トレイ} TRE™ イレオストミー			フリー カット	15-70×90mm	～3日	3022-70	3021-70		
	ノバライフ1 ^{トレイ} TRE™ イレオストミー フィット	フリー カット	15-24mm	～4日	3020-24	—	8,000	P46	キャップ式排出口	
			15-34mm	～4日	3020-34	3019-34	8,000			
			15-44mm	～4日	3020-44	—	8,000			
			15-54mm	～4日	3020-54	3019-54	8,000			
		ブレ カット	25mm	～4日	3020-25	—	8,000			
			30mm	～4日	3020-30	—	8,000			
			35mm	～4日	3020-35	—	8,000			
			ノバライフ1 ^{トレイ} TRE™ イレオストミー コンベックス	フリー カット	15-37mm	～4日	3010-37			—
	15-46mm	～4日			3010-46	3011-46	8,000			
	15-59mm	～4日			3010-59	—	8,000			
	ノバ1 イレオストミー	フリー カット	20-60mm	1-3日	822-20/5	—	3,500	P48	5枚入り キャップ式排出口	
	ノバ1 イレオストミー X5	ブレ カット	25mm	1-4日	820-25	—	9,000	P49	最大7mm 指で伸ばせます キャップ式排出口	
			30mm	1-4日	820-30	—	9,000			
			35mm	1-4日	820-35	—	9,000			

Index 製品一覧 [装具]

ストーマの 種類	装具の 種類	製 品 名 称	規 格		貼付 日数 目安	製品番号		標準 価格 (非課税)	ページ	備考			
						透 明	肌 色						
イレオストミー	単品系	ノバ1 イレオストミー コンベックス	フリー カット	15-24mm	1-4日	810-24	—	4,600	P50	5枚入り キャップ式排出口			
				15-37mm	1-4日	810-37	—	4,600					
				15-46mm	1-4日	810-46	—	4,600					
			ブレ カット	25mm	1-4日	810-25	—	4,600					
				30mm	1-4日	810-30	—	4,600					
				35mm	1-4日	810-35	—	4,600					
				40mm	1-4日	810-40	—	4,600					
ノバライフ1 TRE™ ウロストミー		フリー カット	15-55×70mm (タテ×ヨコ)	～3日	3492-15	3491-15	8,000	P51	タップ式排出口				
			25-55×70mm (タテ×ヨコ)	～3日	3492-25	—	8,000						
ウロストミー		ノバライフ1 TRE™ ウロストミー フィット	フリー カット	15-24mm	～4日	3496-24	—	11,000	P52	タップ式排出口			
				15-34mm	～4日	3496-34	—	11,000					
				15-44mm	～4日	3496-44	—	11,000					
			ブレ カット	25mm	～4日	3496-25	—	11,000					
				30mm	～4日	3496-30	—	11,000					
			ノバライフ1 TRE™ ウロストミー コンベックス	フリー カット	15-24mm	～4日	3494-24	—			11,000	P53	タップ式排出口
					15-37mm	～4日	3494-37	—			11,000		
		15-46mm			～4日	3494-46	—	11,000					
		ブレ カット		25mm	～4日	3494-25	—	11,000					
				30mm 最大有効径 37mm	～4日	3494-30	—	11,000					
		ノバ1 ウロストミー X3	フリー カット	12-46mm	1-3日	892-12	—	8,500	P54	リング状皮膚 保護剤内蔵			
				20mm	1-3日	892-20	—	8,500		最大5mm 指で伸ばせます リング状皮膚 保護剤内蔵			
			ブレ カット	25mm	1-3日	892-25	—	8,500					
				30mm	1-3日	892-30	—	8,500					
		ノバ1 ウロストミー コンベックス	フリー カット	15-24mm	1-3日	894-24	—	9,800	P55				
				15-37mm	1-3日	894-37	—	9,800					
			ブレ カット	20mm	1-3日	894-20	—	9,800					
				25mm	1-3日	894-25	—	9,800					
				30mm	1-3日	894-30	—	9,800					
		小児用	ノバ1 インファント ドレイン	フリー カット	0-40mm	1-2日	818-00/10	—	4,000	P56	フィルターなし		
					10-40mm	1-2日	818-10/10	—	4,000				
		コロストミー	ノバ1 ミニキャップ	ブレ カット	30mm	1時間 -2日	—	829-30/10	2,600	P57			
40mm					1時間 -2日	—	829-40/10	2,600					
50mm					1時間 -2日	—	829-50/10	2,600					
コロストミー イレオストミー ウロストミー		二品系 面板	ノバライフ2 TRE™ リング	フランジ 36mm	フリー カット	15-28mm	～5日	3136-15		P60			
	フリー カット				15-35mm	～5日	3143-15						
	フランジ 43mm			ブレ カット	25mm	～5日	3143-25						
					30mm	～5日	3143-30						
	フランジ 55mm			フリー カット	15-47mm	～5日	3155-15						
					35mm	～5日	3155-35						
				ブレ カット	40mm	～5日	3155-40						

ストーマの 種類	装具の 種類	製 品 名 称	規 格			貼 付 日 数 目 安	製品番号		標 準 価 格 (非課税)	ペー ジ	備 考			
							透 明	肌 色						
コロストミー イレオストミー ウロストミー	二品系 面板	ノバライフ 2 TRE™ リング	フランジ 70mm	フリー カット	15-62mm	～5日	3170-15		4,000	P60				
		ノバライフ 2 TRE™ フィット リング	フランジ 43mm	フリー カット	15-25mm	～6日	3343-15		4,550	P61				
				ブレ カット	25mm	～6日	3343-25		4,550					
			フランジ 55mm	フリー カット	15-38mm	～6日	3355-15		4,550					
				ブレ カット	30mm	～6日	3355-30		4,550					
					35mm	～6日	3355-35		4,550					
				フランジ 70mm	フリー カット	15-52mm	～6日	3370-15				4,550		
		ノバライフ 2 TRE™ コンベックス リング	フランジ 36mm	フリー カット	15-23mm	～6日	3236-15		5,250	P62				
			フランジ 43mm	フリー カット	15-30mm	～6日	3243-15		5,250					
				ブレ カット	25mm	～6日	3243-25		5,250					
					30mm	～6日	3243-30		5,250					
				フランジ 55mm	フリー カット	15-42mm	～6日	3255-15				5,250		
			ブレ カット		35mm	～6日	3255-35		5,250					
					40mm	～6日	3255-40		5,250					
			フランジ 70mm		フリー カット	15-59mm	～6日	3270-15				5,250		
			ノバライフ 2 リング	フランジ 36mm	フリー カット	10-28mm	1-4日	1736-10				3,900	P63	
					ブレ カット	20mm	1-4日	1736-20				3,900		
		25mm				1-4日	1736-25		3,900					
		フランジ 43mm		フリー カット	10-35mm	1-4日	1743-10		3,900					
				ブレ カット	25mm	1-4日	1743-25		3,900					
					30mm	1-4日	1743-30		3,900					
		フランジ 55mm		フリー カット	10-47mm	1-4日	1755-10		3,900					
				ブレ カット	35mm	1-4日	1755-35		3,900					
					40mm	1-4日	1755-40		3,900					
		フランジ 70mm		フリー カット	10-62mm	1-4日	1770-10		3,900					
				ブレ カット	45mm	1-4日	1770-45		3,900					
					50mm	1-4日	1770-50		3,900					
					ノバライフ 2 コンベックス リング	フランジ 36mm	フリー カット	10-23mm	1-4日	1936-10		4,650		
		ブレ カット		20mm			1-4日	1936-20		4,650				
			23mm	1-4日			1936-23		4,650					
		フランジ 43mm	フリー カット	10-30mm		1-4日	1943-10		4,650					
			ブレ カット	25mm		1-4日	1943-25		4,650					
				30mm		1-4日	1943-30		4,650					
		フランジ 55mm	フリー カット	10-42mm		1-4日	1955-10		4,650					
			ブレ カット	35mm 最大有効径 42mm		1-4日	1955-35		4,650					
				40mm		1-4日	1955-40		4,650					
		フランジ 70mm	フリー カット	10-59mm		1-4日	1970-10		4,650					
			ブレ カット	40mm 最大有効径 59mm		1-4日	1970-40		4,650					
				45mm 最大有効径 59mm		1-4日	1970-45		4,650					

Index 製品一覧 [装具]

ストーマの種類	装具の種類	製品名称	規格			貼付 日数 目安	製品番号		標準 価格 (非課税)	ページ	備考		
							透 明	肌 色					
コロストミー イレオストミー	二品系 ストーマ袋	ノバライフ2 ミニオープン	フランジ 36mm				1320-36/10	1319-36/10	3,800	P65			
			フランジ 43mm				1320-43/10	1319-43/10	3,800				
			フランジ 55mm				1320-55/10	1319-55/10	3,800				
		ノバライフ2 オープン	フランジ 36mm				1316-36/10	1315-36/10	4,100	P65			
			フランジ 43mm				1316-43/10	1315-43/10	4,100				
			フランジ 55mm				1316-55/10	1315-55/10	4,100				
			フランジ 70mm				1316-70/10	1315-70/10	4,100				
		ノバライフ2 マキシ オープン	フランジ 43mm				1322-43/10	1321-43/10	4,400	P65			
			フランジ 55mm				1322-55/10	1321-55/10	4,400				
			フランジ 70mm				1322-70/10	1321-70/10	4,400				
		コロストミー	二品系 ストーマ袋	ノバライフ2 ミニクローズ	フランジ 36mm				—	1303-36/10	2,700	P65	
					フランジ 43mm				—	1303-43/10	2,700		
フランジ 55mm						—	1303-55/10	2,700					
ノバライフ2 クローズ	フランジ 36mm				—	1301-36/10	2,700	P65					
	フランジ 43mm				1302-43/10	1301-43/10	2,700						
	フランジ 55mm				1302-55/10	1301-55/10	2,700						
イレオストミー	ノバライフ2 イレオストミー	フランジ 43mm				—	1307-43	5,500	P66				
		フランジ 55mm				1308-55	1307-55	5,500					
		フランジ 70mm				1308-70	1307-70	5,500					
コロストミー イレオストミー ウロストミー	二品系 面 板	ノバ2 リング	フランジ 36mm	フリー カット	12-28mm	1-4日	1136-12		3,900	P67			
					15-28mm	1-4日	1136-15		3,900				
				ブレ カット	20mm	1-4日	1136-20		3,900				
					25mm	1-4日	1136-25		3,900				
			フランジ 43mm	フリー カット	15-35mm	1-4日	1143-15		3,900				
					25mm	1-4日	1143-25		3,900				
				30mm	1-4日	1143-30		3,900					
			フランジ 55mm	フリー カット	15-47mm	1-4日	1155-15		3,900				
					35mm	1-4日	1155-35		3,900				
				40mm	1-4日	1155-40		3,900					
			フランジ 70mm	フリー カット	15-62mm	1-4日	1170-15		3,900				
		ノバ2 X3 リング	フランジ 43mm	フリー カット	15-30mm	1-4日	1343-15		4,000	P68	リング状皮膚保護剤内蔵		
				ブレ カット	25mm	1-4日	1343-25		4,000		最大5mm指で伸ばせます リング状皮膚保護剤内蔵		
			フランジ 55mm	フリー カット	15-42mm	1-4日	1355-15		4,000		リング状皮膚保護剤内蔵		
					32mm	1-4日	1355-32		4,000		最大5mm指で伸ばせます リング状皮膚保護剤内蔵		
				ブレ カット	35mm	1-4日	1355-35		4,000				
					ノバ2 X5 リング	フランジ 43mm	ブレ カット	18mm	1-5日		1443-18		4,250
		21mm	1-5日	1443-21				4,250					
		25mm	1-5日	1443-25				4,250					
		28mm	1-5日	1443-28				4,250					

ストーマの 種類	装具の 種類	製 品 名 称	規 格			貼 付 日 数 目 安	製 品 番 号		標 準 価 格 (非課税)	ペ ー ジ	備 考	
							透 明	肌 色				
コロストミー イレオストミー ウロストミー	二 品 系 面 板	ノバ2 X5 リング	フランジ 55mm	ブレ カット	32mm	1-5日	1455-32		4,250	P69	最大7mm指で伸ばせます リング状皮膚保護剤内蔵	
					35mm	1-5日	1455-35		4,250			
					38mm	1-5日	1455-38		4,250			
		ノバ2 コンベックス リング	フランジ 36mm	フリー カット	15-23mm	1-4日	1536-15		4,600	P70		
					20mm	1-4日	1536-20		4,600			
				23mm	1-4日	1536-23		4,600				
			フランジ 43mm	フリー カット	15-30mm	1-4日	1543-15		4,600			
					25mm	1-4日	1543-25		4,600			
				30mm	1-4日	1543-30		4,600				
			フランジ 55mm	フリー カット	15-42mm	1-4日	1555-15		4,600			
					35mm	1-4日	1555-35		4,600			
				40mm	1-4日	1555-40		4,600				
		コロストミー イレオストミー	二品系 ストーマ袋	ノバ2 ミニフォールドアップ	フランジ 36mm				—	1219-36	3,400	P71
フランジ 43mm						—	1219-43	3,400				
フランジ 55mm						—	1219-55	3,400				
ノバ2 フォールドアップ	フランジ 36mm				1216-36	1215-36	3,700	P71				
	フランジ 43mm				1216-43	1215-43	3,700					
	フランジ 55mm				1216-55	1215-55	3,700					
	フランジ 70mm				1216-70	1215-70	3,700					
イレオストミー	ノバ2 イレオストミー	フランジ 43mm				1208-43	1207-43	5,500	P72	キャップ式 排出口		
		フランジ 55mm				1208-55	1207-55	5,500				
		フランジ 70mm				1208-70	1207-70	5,500				
ウロストミー	二品系 ストーマ袋	ノバライフ2 ウロストミー		フランジ 36mm				1418-36	—	5,900	P73	タップ式 排出口
				フランジ 43mm				1418-43	1417-43	5,900		
				フランジ 55mm				1418-55	1417-55	5,900		
		ノバ2 ウロストミー		フランジ 36mm				1218-36	1217-36	6,100	P74	
				フランジ 43mm				1218-43	1217-43	6,100		
				フランジ 55mm				1218-55	1217-55	6,100		

製品一覧 [アクセサリ]

種類	製品名称	規格	製品番号	標準価格 (税込)	ページ	備考
用手成形 皮膚保護剤	TRE ^{トレイ} ™シール 98mm	厚さ2.3mm × 外径98mm × 内径18mm	072-98	2,244	P78	3枚入
	TRE ^{トレイ} ™シール 57mm (内径27mm)	厚さ2.3mm × 外径57mm × 内径27mm	072-57	3,740		10枚入
	TRE ^{トレイ} ™シール 48mm (リングタイプ)	厚さ2.3mm × 外径48mm × 内径18mm	072-48	3,740		10枚入
リング状 皮膚保護剤	GXトラシール (30枚)	内径 20mm	725-20/30	11,220	P79	30枚入
		内径 30mm	725-30/30	11,220		
		内径 40mm	725-40/30	11,220		
		内径 50mm	725-50/30	11,220		
	GXトラシール (10枚)	内径 20mm	725-20/10	4,070	P79	10枚入
		内径 30mm	725-30/10	4,070		
		内径 40mm	725-40/10	4,070		
		内径 50mm	725-50/10	4,070		
面板 外周部用シール	ダンサック バリアエクステンダー	長さ12.8cm × 幅4.0cm	075-30	2,805	P79	30枚入り
練状皮膚保護剤	ソフトペースト	50g	77550-0	2,200	P79	1本入
消臭液	ダンサック 消臭液ノドールS	50ml	080-00	2,750	P80	1本入
		250ml	080-01	8,250		
清拭用品	スキнтиッシュ		71000-0000	3,080	P80	50枚入
閉鎖具	クランプ		092-00	2,613	P80	25個入
	ソフトワイヤータイ		095-02	1,705	P80	50本入
排液バッグ	ドレインネージバッグ 消化管用	2000ml	450-00	6,380	P81	10枚入
排液バッグ	ドレインネージバッグ 尿路用	2000ml	420-00	7,700	P81	10枚入
接続管	ドレインチューブアダプター		400-50	4,950	P81	10個入
ベルト	ダンサックベルト	100cm (白)	09000-0000	770	P82	1本入
		100cm (肌色)	090-02	770		
	ベルトバック 85mm	ベルトプレート85mm 5枚/ベルト1本(白)	09075-0000	1,760	P82	
	ベルトバック 48mm	ベルトプレート48mm 5枚/ベルト1本(肌色)	09076-0000	1,760		

本カタログでは、税抜価格に10%を乗じて、小数点第一位を四捨五入した金額を税込価格としています。
小数点以下の取扱は販売店により異なるため、実際の税込価格と異なる場合があります。

Index 製品番号順索引

製品番号	製品名称	規格			ページ
072-48	TRE ^{トレイ} ™ シール	48mm (リングタイプ)			78
072-57	TRE ^{トレイ} ™ シール	57mm (内径27mm)			78
072-98	TRE ^{トレイ} ™ シール	98mm			78
075-30	ダンサック バリアエクステンダー	長さ12.8cm×幅4.0cm, 30枚入			79
080-00	ダンサック消臭液ノドールS	50ml			80
080-01	ダンサック消臭液ノドールS	250ml			80
090-02	ダンサックベルト	肌色100cm			82
092-00	クランプ	25個入			80
095-02	ソフトワイヤータイ	50本入			80
400-50	ドレインチューブアダプター	10個入			81
420-00	ドレインネージバッグ 尿路用	2,000ml, 10枚入			81
450-00	ドレインネージバッグ 消化管用	2,000ml, 10枚入			81
725-20/10	GX トラシール	内径20mm, 10枚入			79
725-20/30	GX トラシール	内径20mm, 30枚入			79
725-30/10	GX トラシール	内径30mm, 10枚入			79
725-30/30	GX トラシール	内径30mm, 30枚入			79
725-40/10	GX トラシール	内径40mm, 10枚入			79
725-40/30	GX トラシール	内径40mm, 30枚入			79
725-50/10	GX トラシール	内径50mm, 10枚入			79
725-50/30	GX トラシール	内径50mm, 30枚入			79
810-24	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明	フリーカット	15-24mm	50
810-25	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明	プレカット	25mm	50
810-30	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明	プレカット	30mm	50
810-35	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明	プレカット	35mm	50
810-37	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明	フリーカット	15-37mm	50
810-40	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明	プレカット	40mm	50
810-46	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明	フリーカット	15-46mm	50
816-15	ノバ1 マキシ フォールドアップ	透明	フリーカット	15-90mm	41
818-00/10	ノバ1 インファント ドレイン(小児用)	透明	フリーカット	0-40mm	56
818-10/10	ノバ1 インファント ドレイン(小児用)	透明	フリーカット	10-40mm	56
820-25	ノバ1 イレオストミー X5	透明	プレカット(自在孔)	25mm	49
820-30	ノバ1 イレオストミー X5	透明	プレカット(自在孔)	30mm	49
820-35	ノバ1 イレオストミー X5	透明	プレカット(自在孔)	35mm	49
822-20/5	ノバ1 イレオストミー	透明	フリーカット	20-60mm	48
823-15/10	ノバ1 フォールドアップ	肌色	フリーカット	15-60mm	41
823-25/10	ノバ1 フォールドアップ	肌色	プレカット	25mm	41
823-30/10	ノバ1 フォールドアップ	肌色	プレカット	30mm	41
823-35/10	ノバ1 フォールドアップ	肌色	プレカット	35mm	41
823-40/10	ノバ1 フォールドアップ	肌色	プレカット	40mm	41
824-15/10	ノバ1 フォールドアップ	透明	フリーカット	15-60mm	41
824-25/10	ノバ1 フォールドアップ	透明	プレカット	25mm	41
824-30/10	ノバ1 フォールドアップ	透明	プレカット	30mm	41
824-35/10	ノバ1 フォールドアップ	透明	プレカット	35mm	41
824-40/10	ノバ1 フォールドアップ	透明	プレカット	40mm	41
824-45/10	ノバ1 フォールドアップ	透明	プレカット	45mm	41
825-15/10	ノバ1 ミニフォールドアップ	肌色	フリーカット	15-50mm	41
826-15/10	ノバ1 ミニフォールドアップ	透明	フリーカット	15-50mm	41

Index 製品番号順索引

製品番号	製品名称	規 格			ページ
829-30/10	ノバ1 ミニキャップ	肌色	プレカット	30mm	57
829-40/10	ノバ1 ミニキャップ	肌色	プレカット	40mm	57
829-50/10	ノバ1 ミニキャップ	肌色	プレカット	50mm	57
841-20	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色	プレカット	20mm	44
841-24	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色	フリーカット	15-24mm	44
841-25	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色	プレカット	25mm	44
841-30	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色	プレカット	30mm	44
841-35	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色	プレカット	35mm	44
841-37	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色	フリーカット	15-37mm	44
841-46	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色	フリーカット	15-46mm	44
842-20	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明	プレカット	20mm	44
842-24	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明	フリーカット	15-24mm	44
842-25	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明	プレカット	25mm	44
842-30	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明	プレカット	30mm	44
842-35	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明	プレカット	35mm	44
842-37	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明	フリーカット	15-37mm	44
842-46	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明	フリーカット	15-46mm	44
861-15	ノバ1 フォールドアップ X3	肌色	フリーカット	15-46mm	42
861-25	ノバ1 フォールドアップ X3	肌色	プレカット(自在孔)	25mm	42
861-30	ノバ1 フォールドアップ X3	肌色	プレカット(自在孔)	30mm	42
861-35	ノバ1 フォールドアップ X3	肌色	プレカット(自在孔)	35mm	42
862-15	ノバ1 フォールドアップ X3	透明	フリーカット	15-46mm	42
862-25	ノバ1 フォールドアップ X3	透明	プレカット(自在孔)	25mm	42
862-30	ノバ1 フォールドアップ X3	透明	プレカット(自在孔)	30mm	42
862-35	ノバ1 フォールドアップ X3	透明	プレカット(自在孔)	35mm	42
862-40	ノバ1 フォールドアップ X3	透明	プレカット(自在孔)	40mm	42
862-45	ノバ1 フォールドアップ X3	透明	プレカット(自在孔)	45mm	42
881-30	ノバ1 フォールドアップ X5	肌色	プレカット(自在孔)	30mm	43
881-35	ノバ1 フォールドアップ X5	肌色	プレカット(自在孔)	35mm	43
882-25	ノバ1 フォールドアップ X5	透明	プレカット(自在孔)	25mm	43
882-30	ノバ1 フォールドアップ X5	透明	プレカット(自在孔)	30mm	43
882-35	ノバ1 フォールドアップ X5	透明	プレカット(自在孔)	35mm	43
882-40	ノバ1 フォールドアップ X5	透明	プレカット(自在孔)	40mm	43
882-45	ノバ1 フォールドアップ X5	透明	プレカット(自在孔)	45mm	43
892-12	ノバ1 ウロストミー X3	透明	フリーカット	12-46mm	54
892-20	ノバ1 ウロストミー X3	透明	プレカット(自在孔)	20mm	54
892-25	ノバ1 ウロストミー X3	透明	プレカット(自在孔)	25mm	54
892-30	ノバ1 ウロストミー X3	透明	プレカット(自在孔)	30mm	54
894-20	ノバ1 ウロストミー コンベックス	透明	プレカット	20mm	55
894-24	ノバ1 ウロストミー コンベックス	透明	フリーカット	15-24mm	55
894-25	ノバ1 ウロストミー コンベックス	透明	プレカット	25mm	55
894-30	ノバ1 ウロストミー コンベックス	透明	プレカット	30mm	55
894-37	ノバ1 ウロストミー コンベックス	透明	フリーカット	15-37mm	55
901-10/10	ノバライフ1 クローズ	肌色	フリーカット	10-55×70mm	40
901-25/10	ノバライフ1 クローズ	肌色	プレカット	25mm	40
901-30/10	ノバライフ1 クローズ	肌色	プレカット	30mm	40
901-35/10	ノバライフ1 クローズ	肌色	プレカット	35mm	40

製品番号	製品名称	規 格			ページ
901-40/10	ノバライフ1 クローズ	肌色	プレカット	40mm	40
901-45/10	ノバライフ1 クローズ	肌色	プレカット	45mm	40
902-10/10	ノバライフ1 クローズ	透明	フリーカット	10-55×70mm	40
902-25/10	ノバライフ1 クローズ	透明	プレカット	25mm	40
902-30/10	ノバライフ1 クローズ	透明	プレカット	30mm	40
902-35/10	ノバライフ1 クローズ	透明	プレカット	35mm	40
902-40/10	ノバライフ1 クローズ	透明	プレカット	40mm	40
902-45/10	ノバライフ1 クローズ	透明	プレカット	45mm	40
903-10/10	ノバライフ1 ミニクローズ	肌色	フリーカット	10-38×50mm	40
903-25/10	ノバライフ1 ミニクローズ	肌色	プレカット	25mm	40
903-30/10	ノバライフ1 ミニクローズ	肌色	プレカット	30mm	40
903-35/10	ノバライフ1 ミニクローズ	肌色	プレカット	35mm	40
915-10/10	ノバライフ1 マキシ	肌色	フリーカット	10-70×90mm	37
915-30/10	ノバライフ1 マキシ	肌色	プレカット	30mm	37
915-35/10	ノバライフ1 マキシ	肌色	プレカット	35mm	37
916-10/10	ノバライフ1 マキシ	透明	フリーカット	10-70×90mm	37
916-25/10	ノバライフ1 マキシ	透明	プレカット	25mm	37
916-30/10	ノバライフ1 マキシ	透明	プレカット	30mm	37
916-35/10	ノバライフ1 マキシ	透明	プレカット	35mm	37
923-10/10	ノバライフ1	肌色	フリーカット	10-55×70mm	37
923-25/10	ノバライフ1	肌色	プレカット	25mm	37
923-30/10	ノバライフ1	肌色	プレカット	30mm	37
923-35/10	ノバライフ1	肌色	プレカット	35mm	37
923-40/10	ノバライフ1	肌色	プレカット	40mm	37
924-10/10	ノバライフ1	透明	フリーカット	10-55×70mm	37
924-25/10	ノバライフ1	透明	プレカット	25mm	37
924-30/10	ノバライフ1	透明	プレカット	30mm	37
924-35/10	ノバライフ1	透明	プレカット	35mm	37
924-40/10	ノバライフ1	透明	プレカット	40mm	37
924-45/10	ノバライフ1	透明	プレカット	45mm	37
925-10/10	ノバライフ1 ミニ	肌色	フリーカット	10-38×50mm	37
926-10/10	ノバライフ1 ミニ	透明	フリーカット	10-38×50mm	37
941-25	ノバライフ1 コンベックス ミニ	肌色	プレカット	25mm	39
941-30	ノバライフ1 コンベックス	肌色	プレカット	30mm (～37mm)	39
941-35	ノバライフ1 コンベックス	肌色	プレカット	35mm	39
941-37	ノバライフ1 コンベックス	肌色	フリーカット	10-37mm	39
941-40	ノバライフ1 コンベックス	肌色	プレカット	40mm (～46mm)	39
941-45	ノバライフ1 コンベックス	肌色	プレカット	45mm	39
941-46	ノバライフ1 コンベックス	肌色	フリーカット	10-46mm	39
941-50	ノバライフ1 コンベックス マキシ	肌色	プレカット	50mm (～59mm)	39
941-59	ノバライフ1 コンベックス マキシ	肌色	フリーカット	10-59mm	39
942-20	ノバライフ1 コンベックス ミニ	透明	プレカット	20mm (～24mm)	39
942-24	ノバライフ1 コンベックス ミニ	透明	フリーカット	10-24mm	39
942-25	ノバライフ1 コンベックス ミニ	透明	プレカット	25mm	39
942-30	ノバライフ1 コンベックス	透明	プレカット	30mm (～37mm)	39
942-35	ノバライフ1 コンベックス	透明	プレカット	35mm	39
942-37	ノバライフ1 コンベックス	透明	フリーカット	10-37mm	39

Index 製品番号順索引

製品番号	製品名称	規格			ページ
942-40	ノバライフ1 コンベックス	透明	プレカット	40mm (～46mm)	39
942-45	ノバライフ1 コンベックス	透明	プレカット	45mm	39
942-46	ノバライフ1 コンベックス	透明	フリーカット	10-46mm	39
942-50	ノバライフ1 コンベックス マキシ	透明	プレカット	50mm (～59mm)	39
942-59	ノバライフ1 コンベックス マキシ	透明	フリーカット	10-59mm	39
981-24	ノバライフ1 フィット	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-24mm	38
981-25	ノバライフ1 フィット	肌色 (あんしん窓)	プレカット	25mm	38
981-30	ノバライフ1 フィット	肌色 (あんしん窓)	プレカット	30mm	38
981-34	ノバライフ1 フィット	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-34mm	38
981-35	ノバライフ1 フィット	肌色 (あんしん窓)	プレカット	35mm	38
981-40	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	プレカット	40mm	38
981-44	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-44mm	38
981-45	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	プレカット	45mm	38
981-54	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-54mm	38
982-24	ノバライフ1 フィット	透明	フリーカット	15-24mm	38
982-25	ノバライフ1 フィット	透明	プレカット	25mm	38
982-30	ノバライフ1 フィット	透明	プレカット	30mm	38
982-34	ノバライフ1 フィット	透明	フリーカット	15-34mm	38
982-35	ノバライフ1 フィット	透明	プレカット	35mm	38
982-40	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	プレカット	40mm	38
982-44	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	フリーカット	15-44mm	38
982-45	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	プレカット	45mm	38
982-54	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	フリーカット	15-54mm	38
983-24	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-24mm	38
983-25	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	プレカット	25mm	38
983-30	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	プレカット	30mm	38
983-34	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-34mm	38
983-35	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	プレカット	35mm	38
984-24	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	フリーカット	15-24mm	38
984-25	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	プレカット	25mm	38
984-30	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	プレカット	30mm	38
984-34	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	フリーカット	15-34mm	38
984-35	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	プレカット	35mm	38
1136-12	ノバ 2 リング	36mm フランジ	フリーカット	12-28mm	67
1136-15	ノバ 2 リング	36mm フランジ	フリーカット	15-28mm	67
1136-20	ノバ 2 リング	36mm フランジ	プレカット	20mm	67
1136-25	ノバ 2 リング	36mm フランジ	プレカット	25mm	67
1143-15	ノバ 2 リング	43mm フランジ	フリーカット	15-35mm	67
1143-25	ノバ 2 リング	43mm フランジ	プレカット	25mm	67
1143-30	ノバ 2 リング	43mm フランジ	プレカット	30mm	67
1155-15	ノバ 2 リング	55mm フランジ	フリーカット	15-47mm	67
1155-35	ノバ 2 リング	55mm フランジ	プレカット	35mm	67
1155-40	ノバ 2 リング	55mm フランジ	プレカット	40mm	67
1170-15	ノバ 2 リング	70mm フランジ	フリーカット	15-62mm	67
1207-43	ノバ 2 イレオストミー	43mm フランジ	肌色		72
1207-55	ノバ 2 イレオストミー	55mm フランジ	肌色		72
1207-70	ノバ 2 イレオストミー	70mm フランジ	肌色		72

製品番号	製品名称	規格			ページ
1208-43	ノバ 2 イレオストミー	43mm フランジ	透明		72
1208-55	ノバ 2 イレオストミー	55mm フランジ	透明		72
1208-70	ノバ 2 イレオストミー	70mm フランジ	透明		72
1215-36	ノバ 2 フォールドアップ	36mm フランジ	肌色		71
1215-43	ノバ 2 フォールドアップ	43mm フランジ	肌色		71
1215-55	ノバ 2 フォールドアップ	55mm フランジ	肌色		71
1215-70	ノバ 2 フォールドアップ	70mm フランジ	肌色		71
1216-36	ノバ 2 フォールドアップ	36mm フランジ	透明		71
1216-43	ノバ 2 フォールドアップ	43mm フランジ	透明		71
1216-55	ノバ 2 フォールドアップ	55mm フランジ	透明		71
1216-70	ノバ 2 フォールドアップ	70mm フランジ	透明		71
1217-36	ノバ 2 ウロストミー	36mm フランジ	肌色		74
1217-43	ノバ 2 ウロストミー	43mm フランジ	肌色		74
1217-55	ノバ 2 ウロストミー	55mm フランジ	肌色		74
1218-36	ノバ 2 ウロストミー	36mm フランジ	透明		74
1218-43	ノバ 2 ウロストミー	43mm フランジ	透明		74
1218-55	ノバ 2 ウロストミー	55mm フランジ	透明		74
1219-36	ノバ 2 ミニフォールドアップ	36mm フランジ	肌色		71
1219-43	ノバ 2 ミニフォールドアップ	43mm フランジ	肌色		71
1219-55	ノバ 2 ミニフォールドアップ	55mm フランジ	肌色		71
1301-36/10	ノバライフ2 クローズ	36mm フランジ	肌色		65
1301-43/10	ノバライフ2 クローズ	43mm フランジ	肌色		65
1301-55/10	ノバライフ2 クローズ	55mm フランジ	肌色		65
1302-43/10	ノバライフ2 クローズ	43mm フランジ	透明		65
1302-55/10	ノバライフ2 クローズ	55mm フランジ	透明		65
1303-36/10	ノバライフ2 ミニクローズ	36mm フランジ	肌色		65
1303-43/10	ノバライフ2 ミニクローズ	43mm フランジ	肌色		65
1303-55/10	ノバライフ2 ミニクローズ	55mm フランジ	肌色		65
1307-43	ノバライフ2 イレオストミー	43mm フランジ	肌色		66
1307-55	ノバライフ2 イレオストミー	55mm フランジ	肌色		66
1307-70	ノバライフ2 イレオストミー	70mm フランジ	肌色		66
1308-55	ノバライフ2 イレオストミー	55mm フランジ	透明		66
1308-70	ノバライフ2 イレオストミー	70mm フランジ	透明		66
1315-36/10	ノバライフ2 オープン	36mm フランジ	肌色		65
1315-43/10	ノバライフ2 オープン	43mm フランジ	肌色		65
1315-55/10	ノバライフ2 オープン	55mm フランジ	肌色		65
1315-70/10	ノバライフ2 オープン	70mm フランジ	肌色		65
1316-36/10	ノバライフ2 オープン	36mm フランジ	透明		65
1316-43/10	ノバライフ2 オープン	43mm フランジ	透明		65
1316-55/10	ノバライフ2 オープン	55mm フランジ	透明		65
1316-70/10	ノバライフ2 オープン	70mm フランジ	透明		65
1319-36/10	ノバライフ2 ミニオープン	36mm フランジ	肌色		65
1319-43/10	ノバライフ2 ミニオープン	43mm フランジ	肌色		65
1319-55/10	ノバライフ2 ミニオープン	55mm フランジ	肌色		65
1320-36/10	ノバライフ2 ミニオープン	36mm フランジ	透明		65
1320-43/10	ノバライフ2 ミニオープン	43mm フランジ	透明		65
1320-55/10	ノバライフ2 ミニオープン	55mm フランジ	透明		65

Index 製品番号順索引

製品番号	製品名称	規格			ページ
1321-43/10	ノバライフ2 マキシ オープン	43mm フランジ	肌色		65
1321-55/10	ノバライフ2 マキシ オープン	55mm フランジ	肌色		65
1321-70/10	ノバライフ2 マキシ オープン	70mm フランジ	肌色		65
1322-43/10	ノバライフ2 マキシ オープン	43mm フランジ	透明		65
1322-55/10	ノバライフ2 マキシ オープン	55mm フランジ	透明		65
1322-70/10	ノバライフ2 マキシ オープン	70mm フランジ	透明		65
1343-15	ノバ 2 X3 リング	43mm フランジ	フリーカット	15-30mm	68
1343-25	ノバ 2 X3 リング	43mm フランジ	プレカット(自在孔)	25mm	68
1355-15	ノバ 2 X3 リング	55mm フランジ	フリーカット	15-42mm	68
1355-32	ノバ 2 X3 リング	55mm フランジ	プレカット(自在孔)	32mm	68
1355-35	ノバ 2 X3 リング	55mm フランジ	プレカット(自在孔)	35mm	68
1417-43	ノバライフ2 ウロストミー	43mm フランジ	肌色		73
1417-55	ノバライフ2 ウロストミー	55mm フランジ	肌色		73
1418-36	ノバライフ2 ウロストミー	36mm フランジ	透明		73
1418-43	ノバライフ2 ウロストミー	43mm フランジ	透明		73
1418-55	ノバライフ2 ウロストミー	55mm フランジ	透明		73
1443-18	ノバ 2 X5 リング	43mm フランジ	プレカット(自在孔)	18mm	69
1443-21	ノバ 2 X5 リング	43mm フランジ	プレカット(自在孔)	21mm	69
1443-25	ノバ 2 X5 リング	43mm フランジ	プレカット(自在孔)	25mm	69
1443-28	ノバ 2 X5 リング	43mm フランジ	プレカット(自在孔)	28mm	69
1455-32	ノバ 2 X5 リング	55mm フランジ	プレカット(自在孔)	32mm	69
1455-35	ノバ 2 X5 リング	55mm フランジ	プレカット(自在孔)	35mm	69
1455-38	ノバ 2 X5 リング	55mm フランジ	プレカット(自在孔)	38mm	69
1536-15	ノバ 2 コンベックス リング	36mm フランジ	フリーカット	15-23mm	70
1536-20	ノバ 2 コンベックス リング	36mm フランジ	プレカット	20mm	70
1536-23	ノバ 2 コンベックス リング	36mm フランジ	プレカット	23mm	70
1543-15	ノバ 2 コンベックス リング	43mm フランジ	フリーカット	15-30mm	70
1543-25	ノバ 2 コンベックス リング	43mm フランジ	プレカット	25mm	70
1543-30	ノバ 2 コンベックス リング	43mm フランジ	プレカット	30mm	70
1555-15	ノバ 2 コンベックス リング	55mm フランジ	フリーカット	15-42mm	70
1555-35	ノバ 2 コンベックス リング	55mm フランジ	プレカット	35mm	70
1555-40	ノバ 2 コンベックス リング	55mm フランジ	プレカット	40mm	70
1736-10	ノバライフ2 リング	36mm フランジ	フリーカット	10-28mm	63
1736-20	ノバライフ2 リング	36mm フランジ	プレカット	20mm	63
1736-25	ノバライフ2 リング	36mm フランジ	プレカット	25mm	63
1743-10	ノバライフ2 リング	43mm フランジ	フリーカット	10-35mm	63
1743-25	ノバライフ2 リング	43mm フランジ	プレカット	25mm	63
1743-30	ノバライフ2 リング	43mm フランジ	プレカット	30mm	63
1755-10	ノバライフ2 リング	55mm フランジ	フリーカット	10-47mm	63
1755-35	ノバライフ2 リング	55mm フランジ	プレカット	35mm	63
1755-40	ノバライフ2 リング	55mm フランジ	プレカット	40mm	63
1770-10	ノバライフ2 リング	70mm フランジ	フリーカット	10-62mm	63
1770-45	ノバライフ2 リング	70mm フランジ	プレカット	45mm	63
1770-50	ノバライフ2 リング	70mm フランジ	プレカット	50mm	63
1936-10	ノバライフ2 コンベックス リング	36mm フランジ	フリーカット	10-23mm	64
1936-20	ノバライフ2 コンベックス リング	36mm フランジ	プレカット	20mm	64
1936-23	ノバライフ2 コンベックス リング	36mm フランジ	プレカット	23mm	64

製品番号	製品名称	規格			ページ
1943-10	ノバライフ2 コンベックス リング	43mm フランジ	フリーカット	10-30mm	64
1943-25	ノバライフ2 コンベックス リング	43mm フランジ	プレカット	25mm	64
1943-30	ノバライフ2 コンベックス リング	43mm フランジ	プレカット	30mm	64
1955-10	ノバライフ2 コンベックス リング	55mm フランジ	フリーカット	10-42mm	64
1955-35	ノバライフ2 コンベックス リング	55mm フランジ	プレカット	35mm (～42mm)	64
1955-40	ノバライフ2 コンベックス リング	55mm フランジ	プレカット	40mm	64
1970-10	ノバライフ2 コンベックス リング	70mm フランジ	フリーカット	10-59mm	64
1970-40	ノバライフ2 コンベックス リング	70mm フランジ	プレカット	40mm (～59mm)	64
1970-45	ノバライフ2 コンベックス リング	70mm フランジ	プレカット	45mm (～59mm)	64
3010-37	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー コンベックス	透明	フリーカット	15-37mm	47
3010-46	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー コンベックス	透明	フリーカット	15-46mm	47
3010-59	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー コンベックス	透明	フリーカット	15-59mm	47
3011-46	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー コンベックス	肌色	フリーカット	15-46mm	47
3015-15	ノバライフ1 TRE™ マキシ	肌色(あんしん窓)	フリーカット	15-70×90mm	34
3016-15	ノバライフ1 TRE™ マキシ	透明	フリーカット	15-70×90mm	34
3017-15	ノバライフ1 TRE™ マキシ	肌色(あんしん窓)	フリーカット	15-55×70mm	34
3017-25	ノバライフ1 TRE™ マキシ	肌色(あんしん窓)	プレカット	25mm	34
3017-30	ノバライフ1 TRE™ マキシ	肌色(あんしん窓)	プレカット	30mm	34
3018-15	ノバライフ1 TRE™ マキシ	透明	フリーカット	15-55×70mm	34
3018-25	ノバライフ1 TRE™ マキシ	透明	プレカット	25mm	34
3018-30	ノバライフ1 TRE™ マキシ	透明	プレカット	30mm	34
3019-34	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー フィット	肌色	フリーカット	15-34mm	46
3019-54	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー フィット	肌色	フリーカット	15-54mm	46
3020-24	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー フィット	透明	フリーカット	15-24mm	46
3020-25	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー フィット	透明	プレカット	25mm	46
3020-30	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー フィット	透明	プレカット	30mm	46
3020-34	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー フィット	透明	フリーカット	15-34mm	46
3020-35	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー フィット	透明	プレカット	35mm	46
3020-44	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー フィット	透明	フリーカット	15-44mm	46
3020-54	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー フィット	透明	フリーカット	15-54mm	46
3021-70	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー	肌色	フリーカット	15-70×90mm	45
3022-70	ノバライフ1 TRE™ イレオストミー	透明	フリーカット	15-70×90mm	45
3023-15/10	ノバライフ1 TRE™	肌色(あんしん窓)	フリーカット	15-55×70mm	34
3023-25/10	ノバライフ1 TRE™	肌色(あんしん窓)	プレカット	25mm	34
3023-30/10	ノバライフ1 TRE™	肌色(あんしん窓)	プレカット	30mm	34
3023-35/10	ノバライフ1 TRE™	肌色(あんしん窓)	プレカット	35mm	34
3023-40/10	ノバライフ1 TRE™	肌色(あんしん窓)	プレカット	40mm	34
3024-15/10	ノバライフ1 TRE™	透明	フリーカット	15-55×70mm	34
3024-25/10	ノバライフ1 TRE™	透明	プレカット	25mm	34
3024-30/10	ノバライフ1 TRE™	透明	プレカット	30mm	34
3024-35/10	ノバライフ1 TRE™	透明	プレカット	35mm	34
3024-40/10	ノバライフ1 TRE™	透明	プレカット	40mm	34
3024-45/10	ノバライフ1 TRE™	透明	プレカット	45mm	34
3025-15/10	ノバライフ1 TRE™ ミニ	肌色	フリーカット	15-38×50mm	34
3026-15/10	ノバライフ1 TRE™ ミニ	透明	フリーカット	15-38×50mm	34
3041-30	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	肌色(あんしん窓)	プレカット	30mm (～37mm)	36
3041-35	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	肌色(あんしん窓)	プレカット	35mm	36

Index 製品番号順索引

製品番号	製品名称	規格			ページ
3041-37	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-37mm	36
3041-40	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	肌色 (あんしん窓)	プレカット	40mm (～46mm)	36
3041-46	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-46mm	36
3041-59	ノバライフ1 TRE™ コンベックス マキシ	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-59mm	36
3042-24	ノバライフ1 TRE™ コンベックス ミニ	透明	フリーカット	15-24mm	36
3042-30	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	透明	プレカット	30mm (～37mm)	36
3042-35	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	透明	プレカット	35mm	36
3042-37	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	透明	フリーカット	15-37mm	36
3042-40	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	透明	プレカット	40mm (～46mm)	36
3042-46	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	透明	フリーカット	15-46mm	36
3042-59	ノバライフ1 TRE™ コンベックス マキシ	透明	フリーカット	15-59mm	36
3045-24	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-24mm	36
3045-25	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	肌色 (あんしん窓)	プレカット	25mm	36
3046-24	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	透明	フリーカット	15-24mm	36
3046-25	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	透明	プレカット	25mm	36
3081-24	ノバライフ1 TRE™ フィット	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-24mm	35
3081-25	ノバライフ1 TRE™ フィット	肌色 (あんしん窓)	プレカット	25mm	35
3081-30	ノバライフ1 TRE™ フィット	肌色 (あんしん窓)	プレカット	30mm	35
3081-34	ノバライフ1 TRE™ フィット	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-34mm	35
3081-35	ノバライフ1 TRE™ フィット	肌色 (あんしん窓)	プレカット	35mm	35
3081-40	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	プレカット	40mm	35
3081-44	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-44mm	35
3081-45	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	プレカット	45mm	35
3081-54	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-54mm	35
3082-24	ノバライフ1 TRE™ フィット	透明	フリーカット	15-24mm	35
3082-25	ノバライフ1 TRE™ フィット	透明	プレカット	25mm	35
3082-30	ノバライフ1 TRE™ フィット	透明	プレカット	30mm	35
3082-34	ノバライフ1 TRE™ フィット	透明	フリーカット	15-34mm	35
3082-35	ノバライフ1 TRE™ フィット	透明	プレカット	35mm	35
3082-40	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	透明	プレカット	40mm	35
3082-44	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	透明	フリーカット	15-44mm	35
3082-45	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	透明	プレカット	45mm	35
3082-54	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	透明	フリーカット	15-54mm	35
3083-25	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	プレカット	25mm	35
3083-30	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	プレカット	30mm	35
3083-34	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-34mm	35
3083-35	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	プレカット	35mm	35
3084-25	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	透明	プレカット	25mm	35
3084-30	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	透明	プレカット	30mm	35
3084-34	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	透明	フリーカット	15-34mm	35
3084-35	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	透明	プレカット	35mm	35
3136-15	ノバライフ2 TRE™ リング	36mm フランジ	フリーカット	15-28mm	60
3143-15	ノバライフ2 TRE™ リング	43mm フランジ	フリーカット	15-35mm	60
3143-25	ノバライフ2 TRE™ リング	43mm フランジ	プレカット	25mm	60
3143-30	ノバライフ2 TRE™ リング	43mm フランジ	プレカット	30mm	60
3155-15	ノバライフ2 TRE™ リング	55mm フランジ	フリーカット	15-47mm	60
3155-35	ノバライフ2 TRE™ リング	55mm フランジ	プレカット	35mm	60

製品番号	製品名称	規格			ページ
3155-40	ノバライフ2 TRE™ リング	55mm フランジ	プレカット	40mm	60
3170-15	ノバライフ2 TRE™ リング	70mm フランジ	フリーカット	15-62mm	60
3236-15	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	36mm フランジ	フリーカット	15-23mm	62
3243-15	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	43mm フランジ	フリーカット	15-30mm	62
3243-25	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	43mm フランジ	プレカット	25mm	62
3243-30	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	43mm フランジ	プレカット	30mm	62
3255-15	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	55mm フランジ	フリーカット	15-42mm	62
3255-35	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	55mm フランジ	プレカット	35mm	62
3255-40	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	55mm フランジ	プレカット	40mm	62
3270-15	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	70mm フランジ	フリーカット	15-59mm	62
3343-15	ノバライフ2 TRE™ フィット リング	43mm フランジ	フリーカット	15-25mm	61
3343-25	ノバライフ2 TRE™ フィット リング	43mm フランジ	プレカット	25mm	61
3355-15	ノバライフ2 TRE™ フィット リング	55mm フランジ	フリーカット	15-38mm	61
3355-30	ノバライフ2 TRE™ フィット リング	55mm フランジ	プレカット	30mm	61
3355-35	ノバライフ2 TRE™ フィット リング	55mm フランジ	プレカット	35mm	61
3370-15	ノバライフ2 TRE™ フィット リング	70mm フランジ	フリーカット	15-52mm	61
3491-15	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー	肌色	フリーカット	15-55×70mm (タデ×ヨコ)	51
3492-15	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー	透明	フリーカット	15-55×70mm (タデ×ヨコ)	51
3492-25	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー	透明	フリーカット	25-55×70mm (タデ×ヨコ)	51
3494-24	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー コンベックス	透明	フリーカット	15-24mm	53
3494-25	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー コンベックス	透明	プレカット	25mm	53
3494-30	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー コンベックス	透明	プレカット	30mm (～37mm)	53
3494-37	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー コンベックス	透明	フリーカット	15-37mm	53
3494-46	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー コンベックス	透明	フリーカット	15-46mm	53
3496-24	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー フィット	透明	フリーカット	15-24mm	52
3496-25	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー フィット	透明	プレカット	25mm	52
3496-30	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー フィット	透明	プレカット	30mm	52
3496-34	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー フィット	透明	フリーカット	15-34mm	52
3496-44	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー フィット	透明	フリーカット	15-44mm	52
09000-0000	ダンサックベルト	白100cm			82
09075-0000	ベルトバック 85mm (ワンピース用)	ベルトプレート5枚 / ベルト (白)1本			82
09076-0000	ベルトバック 48mm (ワンピース用)	ベルトプレート5枚 / ベルト (肌色)1本			82
71000-0000	スキンティッシュ	50枚入			80
77550-0	ソフトペースト	50g			79

- ダンサック全製品は、安全・品質・サービスともにヨーロッパの規格を満たしている製品に与えられる「CE」マークを取得しています。
- ベルクロはVelcro BVBAの登録商標です。
- 本カタログに掲載されている情報は、医療従事者によるアドバイスの代わりになるものではありません。
- 本カタログの製品寸法は若干の誤差が生じる場合がございますので、目安としてご参照ください。
- 本カタログに明記されている価格は、メーカー希望小売価格です。
- 製品の仕様、価格は予告なく変更することがございます。ご了承ください。
- ご使用に関しては使用説明書をよくお読みください。
- 商品は高温多湿を避け保管してください。
- ストーマ袋は臭いの強い物の近くで保管しないでください。
- ストーマ袋を廃棄する際には、まず使用済みのストーマ袋を空にしてから、地域毎のゴミ処理方法に合わせて廃棄してください。
- 商品のお問い合わせやご注文に際しては、品名、製品番号、ストーマサイズなどの規格をお知らせください。



ホリスターの
アクセサリ
Hollister accessories

ホリスターのアクセサリ



泡つるりん(236mlボトル／8mlパック)

アダプト消臭潤滑剤 **消臭潤滑剤**

- 優れた潤滑効果で、簡単にストーマ袋からの排出が可能
- 高い消臭効果で、排泄物のおいをコントロール
- 界面活性剤成分がストーマ袋内の清潔を保持
- 各種消臭ガス抜きフィルターの効果を助長
- ストーマ袋にダメージを与えない水溶性

製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
78500	236mlボトル	1本/箱	2,800円	3,080円
78501	8mlパック	50枚/箱	3,800円	4,180円

主成分：精製水、プロピレングリコール、ポロキサマー188NF、N-エチレン
N-SOYAモルホリニウムエソサルフェート、ヒドロキシエチルセルロース、
オクトキシノール-9、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エチルパラベン、
ブチルパラベン、プロピルパラベン、イソブチルパラベン、水酸化ナトリウム



泡つるりん 使用方法

STEP1 入れる

泡つるりん 約5ml※をストーマ袋の中に入れます。

※小さじ1杯程度、パックの場合は1袋全て

ストーマの袋の裾から入れる場合




フレンジ部分から入れる場合



STEP2 なじませる


ストーマ袋全体に泡つるりんをなじませます。

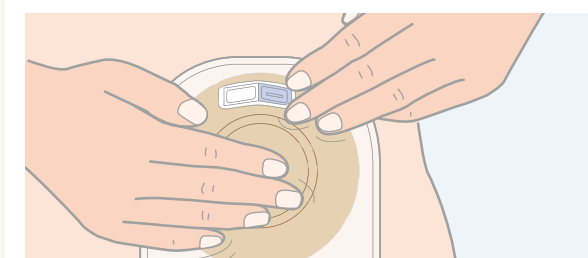

STEP3 泡を確認

ストーマ袋の中全体に泡が確認できれば完了です。

※しばらくすると泡は消えますが、全体に広がった“泡つるりん”により消臭・潤滑効果を発揮します。

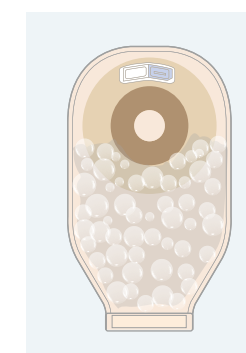

※ストーマ装具の交換時や排泄物の排出のたびに入れてください。

アダプトストーマパウダー 28.3g

粉状皮膚保護剤

- ストーマ周囲などの皮膚を保護する粉状皮膚保護剤
- 皮膚障害のある部位に薄く充填し、面板の密着を補助

製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7906	28.3g	1本/箱	1,100円	1,210円

主成分：ゼラチン、ペクチン、カルボキシメチルセルロース



ストーマ周囲皮膚に 軽いびらんがある方に

- 装着した装具とストーマの隙間に充填し、皮膚への排泄物の付着を防ぎます。
 - 皮膚障害部位など湿った環境に薄く充填することで皮膚保護剤の密着を補助します。
- ※余分なパウダーは軽く振り落としてから面板を貼付してください。

振りかける



アダプト保護膜パック

皮膚被膜剤

- スキンケア成分配合
(アロエベラ脱色全葉エキス+ヒアルロン酸ナトリウム 配合)
- 水分ベースなので、肌から必要な油分や水分を奪わない
- 高い透湿性で自然な皮膚呼吸を妨げない
- 低刺激で肌にやさしい、ノンアルコール

製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7917R	50枚	50枚/箱	2,000円	2,200円

主成分：水分ベース(ノンアルコール)、水分、PVP、ブチレングリコール、酢酸ビニル・ビニルピロリドン共重合体、アロエベラ脱色全葉エキス、ヒアルロン酸ナトリウム、オクトキシノール-9、PED-12 ジメチコンエデト酸二ナトリウム、ジアゾニジル尿素、3-ヨード-2-カルバミン酸塩



アダプト保護膜パック 使用方法

1. 使用する前に、皮膚を清潔で乾いた状態にします。
 2. アダプト保護膜パックを薄くまんべんなく塗り、乾かします。
- ※ 傷のある皮膚面(びらん、ただれ、褥瘡等)や敏感な場所(目や目の周辺)には使用できません。

アダプト剥離剤スプレー

粘着剥離剤

- 皮膚保護剤をしっかりと剥離、のり残りの心配なし
- 剥離後、肌はサラサラで装具交換をより簡単に(シリコン素材使用)
- お肌に低刺激のノンアルコール剥離剤


製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7737	50ml	1本/箱	1,900円	2,090円

主成分：ヘキサメチルジシロキサン
加圧ガス：ニトロゲン



とくらく
得楽タイプ

どの角度からでも
スプレー可能

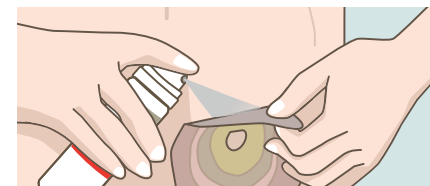

アダプト剥離剤パック

粘着剥離剤

- 皮膚保護剤をしっかりと剥離、のり残りの心配なし
- 剥離後、肌はサラサラで装具交換をより簡単に(シリコン素材使用)
- お肌に低刺激のノンアルコール剥離剤
- パックは必要分だけ持ち運べるので外出にも便利

製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7760	50枚	50枚/箱	1,800円	1,980円

主成分：ヘキサメチルジシロキサン



剥離剤 使用方法

1. 皮膚保護剤や粘着テープの端を剥がし、剥離剤を使用し優しく剥がします。
 2. 皮膚保護剤や粘着テープが皮膚から完全に剥がれたら、粘着剤の残りを優しく拭き取ります。
 3. 皮膚を水と石鹸で洗い、よくすすぎ、水分を十分に拭き取ります。
- ※スプレーは、振らずに使用できます。

[注意事項]火気厳禁。直射日光、電気器具、熱源の近くでご使用しないでください。

キャップのシリーズ専用 コネクター

- キャップのシリーズを一般的な蓄尿袋への接続をする場合に使用
- ロック式接続でひねるだけで確実にロック

製品番号	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7332	5個/箱	80円	88円



※排泄物の性状により詰まり、流れにくい場合があります。流れが悪い場合は、コネクターの使用による併用は避けください。
※使用時は、蓄尿袋のチューブの先端部をカットし、チューブ部分にコネクターの先端(細い方)を接続ください。